


anthoFit[®]

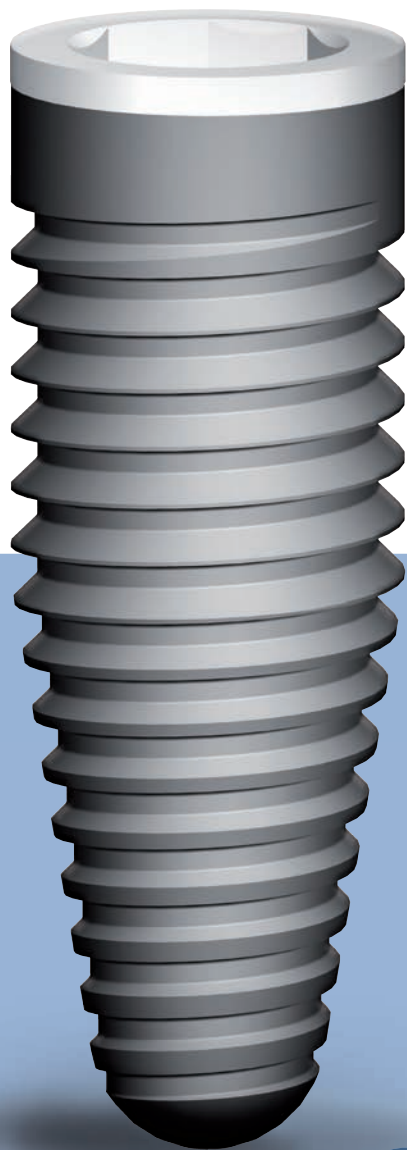

Implant system

SOMMAIRE

CONTENTS

1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® / THE ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM	6
→ Une gamme complète d'implants - <i>A complete range of implants</i>	8
→ Traitement BCP® - <i>BCP® treatment</i>	11
→ Des prothèses esthétiques - <i>Aesthetic protheses</i>	12
→ Sécurité et simplicité - <i>Safety and simplicity</i>	13
→ Évolutivité et ergonomie - <i>Adaptability and ergonomic</i>	14
→ Synoptique prothétique - <i>Prosthetics overview</i>	16
→ Diagramme prothétique - <i>Prosthetics diagram</i>	18
2. GAMME D'IMPLANTS ANTHOFIT® / THE RANGE OF ANTHOFIT® IMPLANTS	20
→ Implants - <i>Implants</i>	22
→ Vis de cicatrisation - <i>Healing screws</i>	24
→ Transferts et analogues - <i>Transfers and analogs</i>	25
3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE / PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS	30
→ Moignons provisoires PEEK - <i>Temporary abutments PEEK</i>	32
→ Moignons zircone Z plus® - <i>Zircon Z plus® abutments</i>	33
→ Moignons titanes TiN plus® - <i>Titanium TiN plus® abutments</i>	34
→ Moignons d'essayage - <i>Try-in abutments</i>	37
→ Moignons surcoulés-or et calcinables - <i>Gold over-castable abutments & castable abutments</i>	38
→ Piliers coniques - <i>Conical abutments</i>	40
→ Attachements boule - <i>Ball attachments</i>	42
→ Analogues de manipulation et vis de laboratoire - <i>Manipulation analogs & laboratory screws</i>	44
→ Synoptique couple de vissage - <i>Prosthetic tightening wrenches overview</i>	45
→ Trousse prothétique - <i>Prosthetic kit</i>	46
→ Clé à cliquet dynamométrique et Torq Control® - <i>Dynamometrical torq wrench & Torq Control®</i>	47
4. ANCILLAIRE CHIRURGICAL / SURGICAL KIT	48
→ Trousses Anthofit® - <i>Anthofit® Surgical kits</i>	50
→ Module de base Anthofit® - <i>Anthofit® basic kit</i>	51
→ Module Anthofit® HE straight - <i>Anthofit® HE straight specific kit</i>	52
→ Module Anthofit® OI straight - <i>Anthofit® OI straight specific kit</i>	53
→ Module Anthofit® OI tapered - <i>Anthofit® OI tapered specific kit</i>	54
5. INSTRUMENTATION PÉRIPHÉRIQUE / PERIPHERICAL INSTRUMENTS	56

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE - CORPORATE PRESENTATION

ANTHOGYR, LA SOLUTION GLOBALE EN IMPLANTOLOGIE

ANTHOGYR, A GLOBAL SOLUTION FOR DENTAL IMPLANTOLOGY



Anthogyr conçoit, fabrique et distribue des implants et des instruments dentaires. Grâce à un savoir-faire unique cumulant 60 ans d'expérience en instrumentation et 25 ans d'expertise en implantologie, anthogyr est la seule entreprise au monde capable de vous proposer une solution globale pour l'implantologie, maîtrisée de la conception au service après vente, en passant par la formation.

Dès l'arrivée de l'implantologie dans le monde dentaire, nous avons étudié, développé et industrialisé des gammes complètes avec la conviction que notre expérience élargie fera d'anthogyr une société experte, à même de proposer des solutions idéales pour faciliter votre pratique quotidienne.

Anthogyr, c'est aussi une grande aventure humaine : une équipe engagée, investie et intègre, une présence mondiale assurée dans plus de 85 pays par un réseau de filiale et de distributeurs solidement établis, une collaboration étroite avec des équipes de scientifiques experts dans leur domaine de compétence.

L'expérience, le dynamisme et la volonté de développement sont des points également essentiels qui permettent à Anthogyr d'être votre partenaire privilégié.

Notre grande satisfaction est de compter sur la fidélité de nos clients, pour certains depuis des décennies, en France comme à l'étranger. Qu'ils en soient ici tous remerciés. Anthogyr designs, manufactures and distributes dental implants and dental instruments.

We benefit a unique know-how and combine respectively 60 years of experience in dental instrument and 25 years in implantology. This peculiar profile makes the only company in the world able to propose a global solution, from product design to after-sales service and training sessions.

As soon as implantology came into the dental field, we studied, developed and industrialized complete ranges; we are convinced that our long experience has made Anthogyr the company in the best position to propose ideal solutions making your dental practice easier.

Anthogyr is also a human adventure : our team is fully involved, invested and upright. We export to over 85 countries via subsidiary companies and distributors firmly established, and we work closely with committees of scientific expertise in their area of competence.

Our experience, our dynamism as well as our will to continuously develop are the assets that have allowed anthogyr to become your privileged partner.

It gives us great satisfaction to rely on our customers' faithfulness, some of them for decades, in France and abroad. We would like to take this opportunity to thank all of them.

LE NOUVEAU SITE INDUSTRIEL ANTHOGRYR, UN OUTIL DIMENSIONNÉ POUR L'AVENIR

*ANTHOGRYR NEW INDUSTRIAL PLANT :
A FACTORY WITH FUTURE PROSPECTS*



Pour assurer notre croissance et une distribution dans plus de 85 pays, nous nous sommes dotés en 2007 d'un site industriel de 8000 m², avec une capacité et une performance de production élevées.

To ensure our continued growth and exportation to over 85 countries, we relocated in 2007 to a new 8,000 sqm factory, with high production capability.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE - CORPORATE PRESENTATION



Notre écoute de la profession et de notre Comité Scientifique représente le début d'une longue chaîne parfaitement maîtrisée par anthogyr qui va du pôle Recherche & Développement, du Service Marketing, de la Fabrication au service Commercial. Ce savoir-faire vous assure des produits innovants, certifiés et marqués CE, possédant un haut niveau de fiabilité et de qualité.

Anthogyr is always willing to lend an attentive ear to dental professionals and to our scientific committee : this is the beginning of a long corporate controlled network (from Research & Development Dept., production, to Sales & Marketing Dept.).

Our technological know-how ensures innovative, high-quality, reliable, certified and CE marked products.



Avec la volonté qui est la nôtre d'accompagner et soutenir nos clients chirurgiens-dentistes, nous nous sommes dotés d'un centre de formation exceptionnel qui bénéficie des dernières technologies.

As our wish is to promote our products and help dental surgeons, Anthogyr now has an exceptional training center with the most cutting edge technologies.



Par la lecture de ce document, nous vous invitons à découvrir l'ensemble des solutions que nous mettons à votre disposition pour votre pratique et nous espérons que les preuves d'efficacité que nous vous avons montrées au fil des ans sauront vous convaincre de nous rejoindre ou de nous renouveler votre confiance.

We invite you to read this document and have a look at the solutions made available for your dental practice. We undoubtedly believe that you will think of anthogyr as being a reliable and efficient partner.



SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® CONFORT ET EXHAUSTIVITÉ

*ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM :
COMFORT & EXHAUSTIVENESS*

POUR VOS COMMANDES EN DIRECT
FOR OUR DIRECT ORDERS

FRANCE

Ligne directe 1 : 04 50 58 57 68


Ligne directe 2 : 04 50 58 50 86

Ligne directe 3 : 04 50 58 73 27

EXPORT


Standard : +33 (0)4 50 58 02 37

Fax : +33 (0)4 50 93 78 60

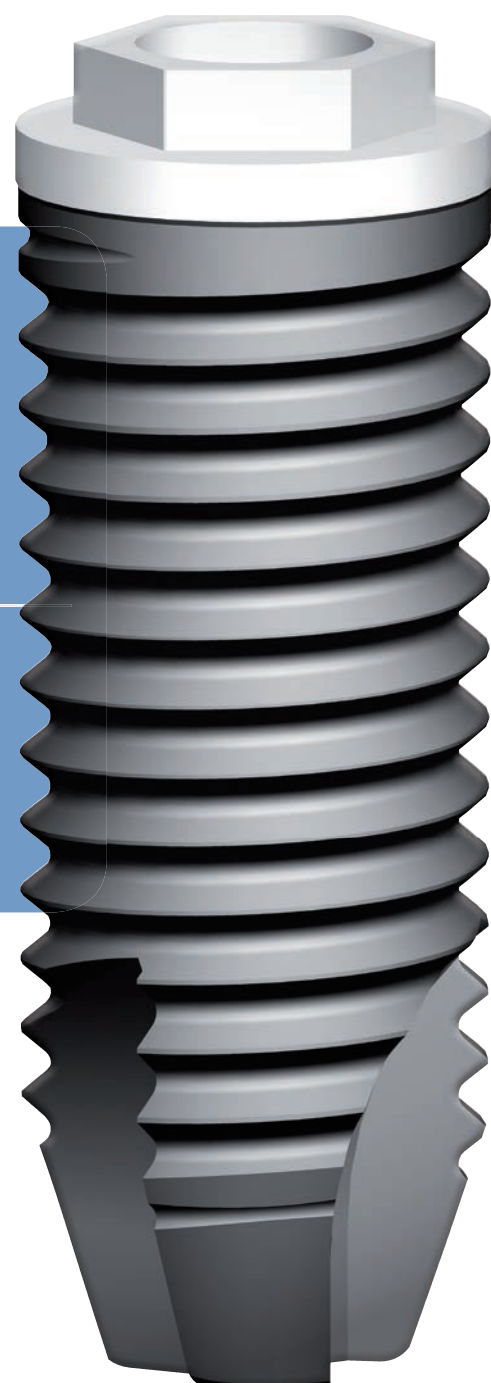

1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM

anthoFit®

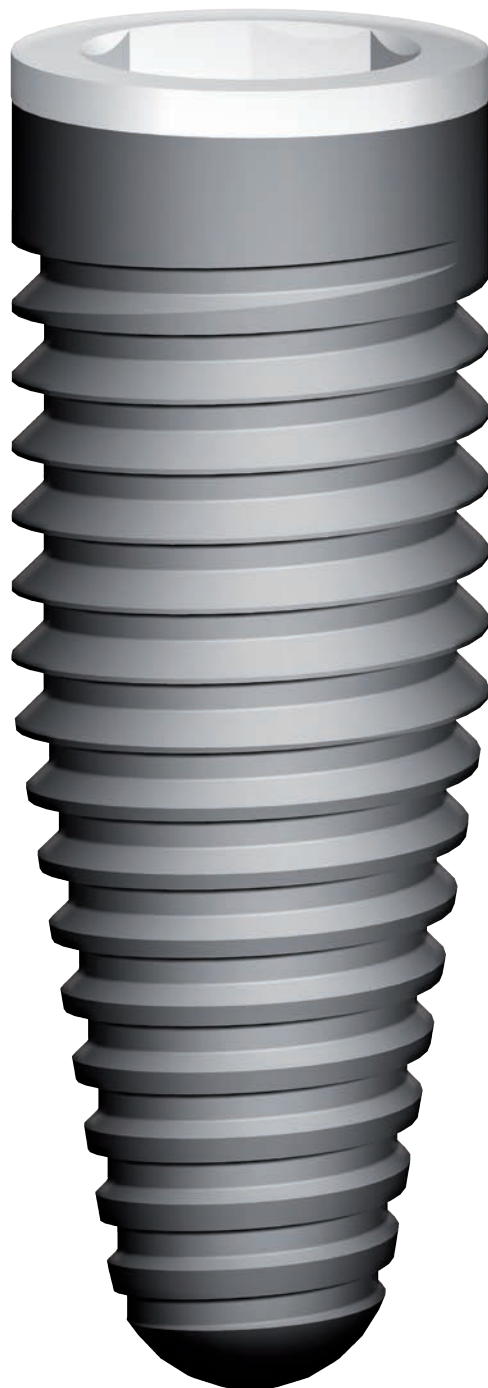

UNE GAMME COMPLÈTE D'IMPLANTS

A COMPLETE RANGE OF IMPLANTS

A. Implants à pans parallèles - *Parallel side implants*

- 15 ans de recul clinique - *15 years of clinical experience.*
- Protocole de pose facile - *Straightforward positioning protocol.*
- Insertion auto-guidante de l'implant - *Self-guiding insertion implant.*
- Profil auto-taraudant - *Self-tapping profile.*
- Utilisable en 1 ou 2 temps chirurgicaux - *Can be used in 1 or 2 stage surgical steps.*
- Polyvalent - *Versatile.*
- Disponible en longueur 8 mm - *Available in 8 mm length.*
- Disponible en diamètre cervical 3.5 mm - *Available in 3.5 mm neck diameter.*
- Deux connexions disponibles - *Two connections available.*



Implant Anthofit® HE
straight Full BCP®

- Connexion hexagone externe.
External hexagon connection.
- Titane grade médical.
Medical grade titanium.
- Surface sablée BCP®.
BCP® sanded surface.
- Col ht 0.5 mm.
Neck height 0.5 mm.
- Filetage rayonné.
Thread without sharp angle.
- Apex atraumatique.
Atraumatic apex.

HE
STRAIGHT

L'hexagone externe (HE) est la connexion historique par excellence. Bénéficiant d'un recul clinique important, l'hexagone externe a acquis ses lettres de noblesse sur de multiples restaurations prothétiques. Flexible et évolutif, il permet de ré-intervenir aisément si nécessaire.

La connexion HE peut recevoir de la prothèse scellée, vissée directe, vissée indirecte, sur barre ou sur attachement boule. Elle est apte à répondre à tous vos cas.

The external hexagon (HE) is the historical connection par excellence. The external hexagon has extensive clinical experience and has acquired its formidable reputation in many prosthetic restorations.

Flexible and adaptable, it enables straightforward revision surgery if necessary.

The HE connection can receive the sealed, directly screwed, indirectly screwed bar or ball attachment prosthesis. It can meet all your needs.

1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM



**Implant Anthofit® OI
straight Full BCP®**

- Connexion octogone interne.
Internal octagon connection.
- Prise directe sans porte-implant intermédiaire.
Held directly without intermediary implant holder.
- Titane grade médical.
Medical grade titanium.
- Surface sablée BCP®.
BCP® sanded surface.
- Col disponible en version Full BCP® ht. 0.4 mm
ou classique ht. 1.5 mm.
*Neck available in Full BCP® version ht. 0.4 mm
or classical ht 1.5 mm.*
- Filetage rayonné.
Thread without sharp angle.
- Apex atraumatique.
Atraumatic apex.

OI
STRAIGHT

De profondeur 1.5 mm et munie d'un clip interne, la connexion octogone interne (OI) incarne la convivialité. Confortable à utiliser en bouche, la connexion OI est également flexible et évolutive dans le temps.

La connexion OI Anthofit® peut recevoir de la prothèse scellée, vissée directe, vissée indirecte, sur barre ou sur attachement boule. Le panel de composants prothétiques associé à cette connexion permet une gestion optimum de l'esthétique.

L'implant Anthofit® OI straight est disponible en version classique avec un col non traité de hauteur 1.5 mm ou bien en version Full BCP®. La version classique permet de conserver plus de flexibilité par rapport au positionnement apico-cronaire de l'interface prothétique et permet d'envisager un positionnement supra-crestal de l'implant, qui ne mette pas en péril la stabilité de l'environnement gingival. La version Full BCP® est recommandée pour les positionnements juxta-crestaux, le traitement de surface du col permettant de favoriser l'attache osseuse à ce niveau.

The 1.5-mm deep internal octagon (OI) with an internal clip embodies conviviality.

The OI connection is easy to use in mouth and is also flexible and adapts over time.

The Anthofit® OI connection can receive the sealed direct screwed, indirect screwed bar or ball attachment prosthesis. The panel of prosthetic components associated with this connection optimises aesthetic management.

The Anthofit® straight OI implant is available in a classical version with an untreated 1.5 mm neck or a Full BCP® version. The classical version retains more flexibility in terms of apico-coronal positioning of the prosthetic interface and allows the consideration of supra-crest positioning of the implant, which does not threaten the stability of the gum environment. The Full BCP® version is recommended for juxta-crest positions, the neck surface treatment helps to promote attachment to bone at this level.



ANTHOFIT FULL BCP®



ANTHOFIT BCP®

UNE GAMME COMPLÈTE D'IMPLANTS

A COMPLETE RANGE OF IMPLANTS

B. Implants anatomiques : Tapered - *Anatomical implants : Tapered*

- Protocole de pose facile - *Simple protocol.*
- Prise directe sans porte-implant intermédiaire - *Held directly without an intermediary implant holder.*
- Forme cylindro-conique à stabilité initiale élevée - *Cylindrico-conical shape with high initial stability.*
- Utilisable en 1 ou 2 temps chirurgicaux - *Can be used in 1 or 2 stage surgical steps.*
- Idéal pour les implantations dans les espaces inter-racines étroits - *Ideal for implantations in narrow inter-root spaces.*
- Idéal pour les implantations proches d'obstacles anatomiques - *Ideal for implantations close to anatomical obstacles.*
- Disponible en longueur 8 mm - *Available in 8 mm length.*
- Disponible en diamètre cervical 3.5 mm - *Available in 3.5 mm neck diameter.*



Implant Anthofit® OI tapered Full BCP®

- Connexion octogone interne.
Internal octagon connection.
- Titane grade médical.
Medical grade titanium.
- Surface sablée BCP®.
BCP® sanded surface.
- Col disponible en version Full BCP® ht. 0.4 mm ou classique ht. 1.5 mm.
Neck available in Full BCP® version ht. 0.4 mm or classical ht. 1.5 mm.
- Filetage rayonné.
Thread without sharp angle.
- Apex atraumatique.
Atraumatic apex.

OI
TAPERED

La connexion et le col de l'implant OI tapered revêt les mêmes caractéristiques que l'implant OI straight décrit précédemment. La gamme prothétique est parfaitement commune aux deux implants.

La forme conique de l'implant OI tapered permet d'optimiser la gestion du volume osseux lorsque celui-ci est réduit (concavité vestibulaire, racines convergentes...). D'autre part elle permet d'augmenter la rétention primaire de l'implant lorsque l'os est très tendre. L'implant OI straight sera notamment très apprécié dans le secteur maxillaire. La forme apicale très arrondie est idéale pour les soulèvements de membranes sinusiennes par voie crestale.

The connection and neck of the straight OI implant has the same features as the tapered OI implant described above. The range of prostheses is entirely common to both implants.

The conical shape of the tapered OI implant optimises management of bone volume when reduced (vestibular concavity, convergent roots, etc). It also helps to increase primary retention of the implant when the bone is soft. The OI straight implant will be particularly well suited in the maxillary sector. The highly rounded apical shape is ideal for raising sinus membranes through a crestal approach.

1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM

TRAITEMENT BCP® : AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES !

BCP® TREATMENT : IMPROVE YOUR PERFORMANCE !

MÉTHODE SOUSTRACTIVE SUBTRACTIVE METHOD

Le traitement BCP® consiste à obtenir une surface rugueuse micro texturée par sablage. L'opération consiste à projeter des particules à la surface de l'implant créant ainsi des micro-impacts à leur surface.

BCP® treatment involves obtaining a sanded micro-textured rough surface. The procedure involves spraying particles onto the surface of the implant creating micro-impacts at their surface.

BCP® : MEDIA DE SABLAGE D'EXCELLENCE BCP® : EXCELLENT SANDING MEDIUM

Le sablage BCP® (Biphasic Calcium Phosphate) est un procédé ultrapropre parfaitement éprouvé et idéal pour l'implantologie dentaire. L'utilisation de particules 100% biocompatibles permet d'obtenir une rugosité idéale (1.5 à 2.0 µm) tout en préservant l'intégrité de la couche de Ti O2 essentielle pour l'ostéointégration. La parfaite solubilité du média BCP® permet de passer l'implant sans utiliser d'acide concentré.

BCP® (Biphasic Calcium Phosphate) sanding is a fully proven ultra-clean process ideal for dental implant surgery. The use of 100% biocompatible particles provides ideal roughness (1.5 to 2.0 µm) at the same time maintaining the integrity of the Ti O2 layer essential for osteointegration. The complete solubility of the BCP® medium allows pacification of the implant preserving acid pacification.

PLUS DE MOUILLABILITÉ (FIG. 1&2) INCREASED WETTABILITY (FIG. 1&2)


La mouillabilité des surfaces traitées au BCP® est supérieure à celle obtenue avec des sablages traditionnels à l'alumine, à la silice ou encore au corindon. Elle permet de stabiliser le caillot sanguin initial, d'établir un contact intime de celui-ci avec la surface de titane et d'obtenir une meilleure adhésion cellulaire.

The wettability of surfaces treated with BCP® is greater than that obtained with traditional alumina, silica or corindon sanding. It helps to stabilise the initial blood clot, establish intimate contact between the blood clot and the titanium surface and provide improved cellular adhesion.

EFFICACITÉ DÈS 6 SEMAINES (FIG. 3&4) EFFECTIVE AS EARLY AS 6 WEEKS (FIG. 3&4)

Des études sur épiphyses fémorales de rat ont montré à 6 semaines une ostéogénèse de contact avec les surfaces traitées BCP® contrairement aux surfaces lisses ou sablées à l'alumine qui présentent une interface fibreuse sans ostéogénèse de contact. Ces résultats ont également été confortés par une étude à 12 semaines menée dans le cadre de l'INSERM. On observe à 6 mois un contact os-implant de 73,31% +/- 17,76% contre 38,01% +/- 9,32% avec des surfaces lisses, quelque soit la qualité de l'os.

Studies on rat femoral epiphyses have demonstrated contact osteogenesis with BCP® surfaces at 6 weeks in contrast to smooth or alumina sanded surfaces, which show a fibrous interface without contact osteogenesis. These results have also been backed up by a 12-week study conducted by INSERM. At 6 months, bone impact contact of 73.31% +/- 17.76% was found compared to 38.01% +/- 9.32% with smooth surfaces regardless of bone quality.

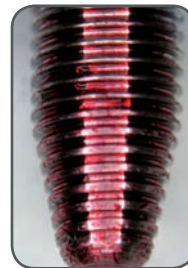


Surface classique :
répartition irrégulière du
caillot sanguin
*Classical surface : irregular
distribution of blood clot*

Fig. 1



Surface BCP® :
répartition rapide et uniforme
du caillot sanguin
*BCP® surface : rapid uniform
distribution of blood clot*


Fig. 2

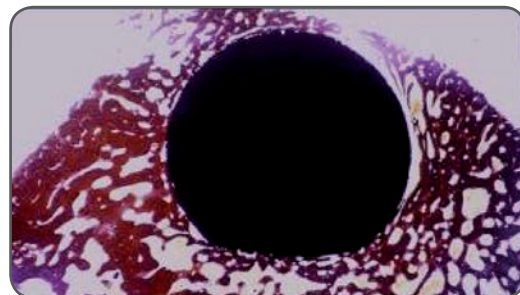

Côté sablage BCP®
BCP® sanded side

Côté sablage alumine
Alumina sanded side

Fig. 3

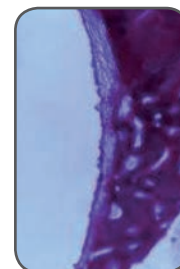

Épiphyse fémorale de rat à 6 semaines
Rat femoral epiphysis at 6 weeks

Fig. 4


DES PROTHÈSES ESTHÉTIQUES

AESTHETIC PROTHESES

A. Profil d'émergence constant - *Constant emergence profile*

Le profil d'émergence constant des différents composants prothétiques permet de faciliter les manipulations pendant les différentes phases prothétiques. Il contribue à une meilleure prévisibilité de l'esthétique et à une insertion sans tension tissulaire et sans douleur des composants en bouche.

The constant emergence profile of the different prosthetic components helps to facilitate manipulation during the various prosthetic phases, providing improved predictability of aesthetic outcome and painless insertion, without tissue tension from the components in the mouth.

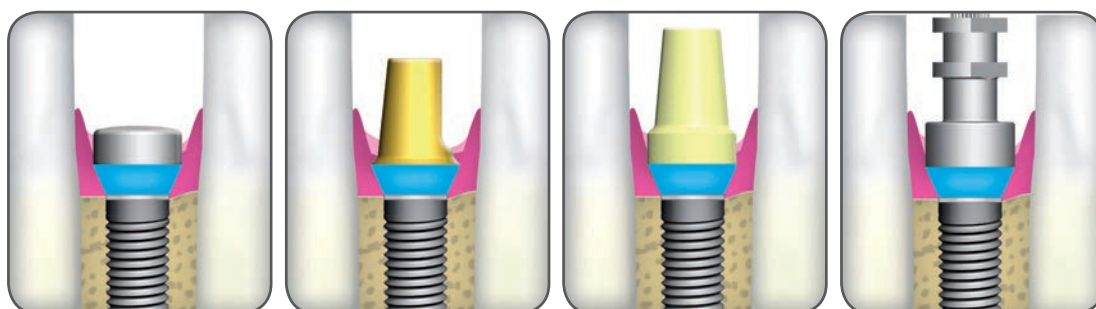

Vis de cicatrisation
Healing screw

Moignon titane
Titanium abutment

Moignon zircone
Zircon abutment

Transfert
Transfer

 : Partie émergente constante - *Constant emerging part*

B. Intégration parodontale - *Parodontal integration*



Gamme TiN plus® - *TiN plus® range*

- Gamme moignon Titane grade V.
Range of abutments made out of titanium grade V.
- Surface biocompatible.
Biocompatible surface.
- Minimise la rétention bactérienne.
Minimises bacterial retention.
- Absence de reflets bleutés en cas de parodonte fin.
No blue colored reflection in cases with thin parodontum.



Gamme Z plus® - *Z plus® range*


- Moignon en Zircone yttrée.
Abutment made of Yttriated Zircon.
- Excellente biocompatibilité.
Excellent biocompatibility.
- Idéal pour les demandes esthétiques élevées.
Ideal for high aesthetic requirements.

1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM

SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ

SAFETY & SIMPLICITY


- Code couleur par bague silicone.
Silicone ring color code.

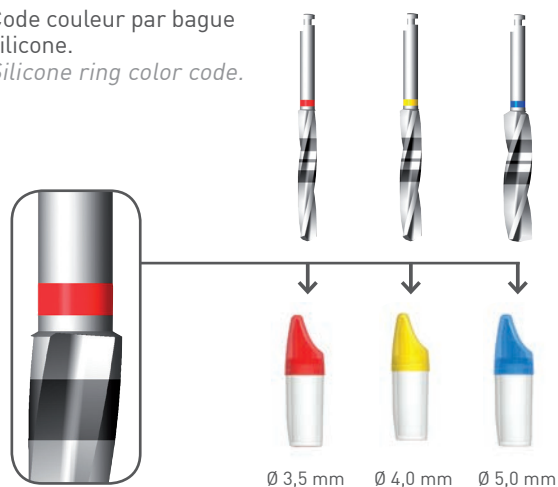

- Forets initiaux à butée.
Initial drills with a stop system.

- Marquage Bee·color®.
Marking Bee·color®.


Bee·color®

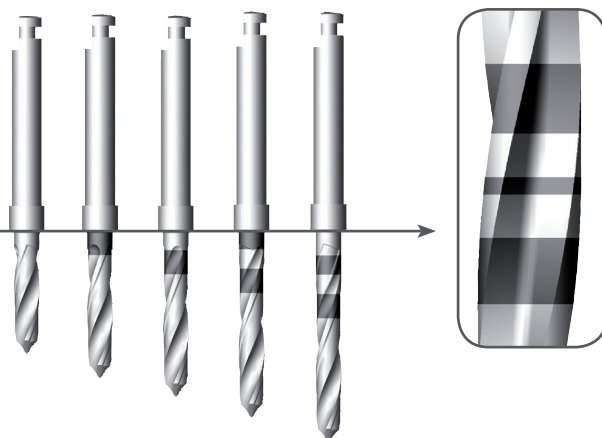

- Vis Black Tite®.
Black Tite® screw.




- Clipage des composants sur connexion OI.
Components clip together on OI connection.

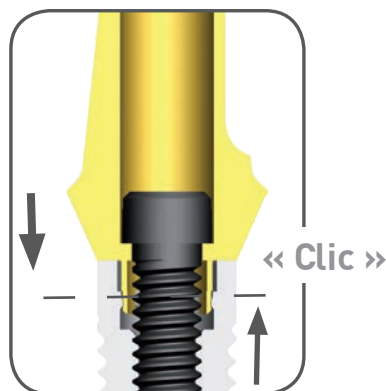

ÉVOLUTIVITÉ ET ERGONOMIE

ADAPTABILITY & ERGONOMICS

A. Performante, ergonomique, simple ...
- High performance, ergonomics,
user-friendly ...

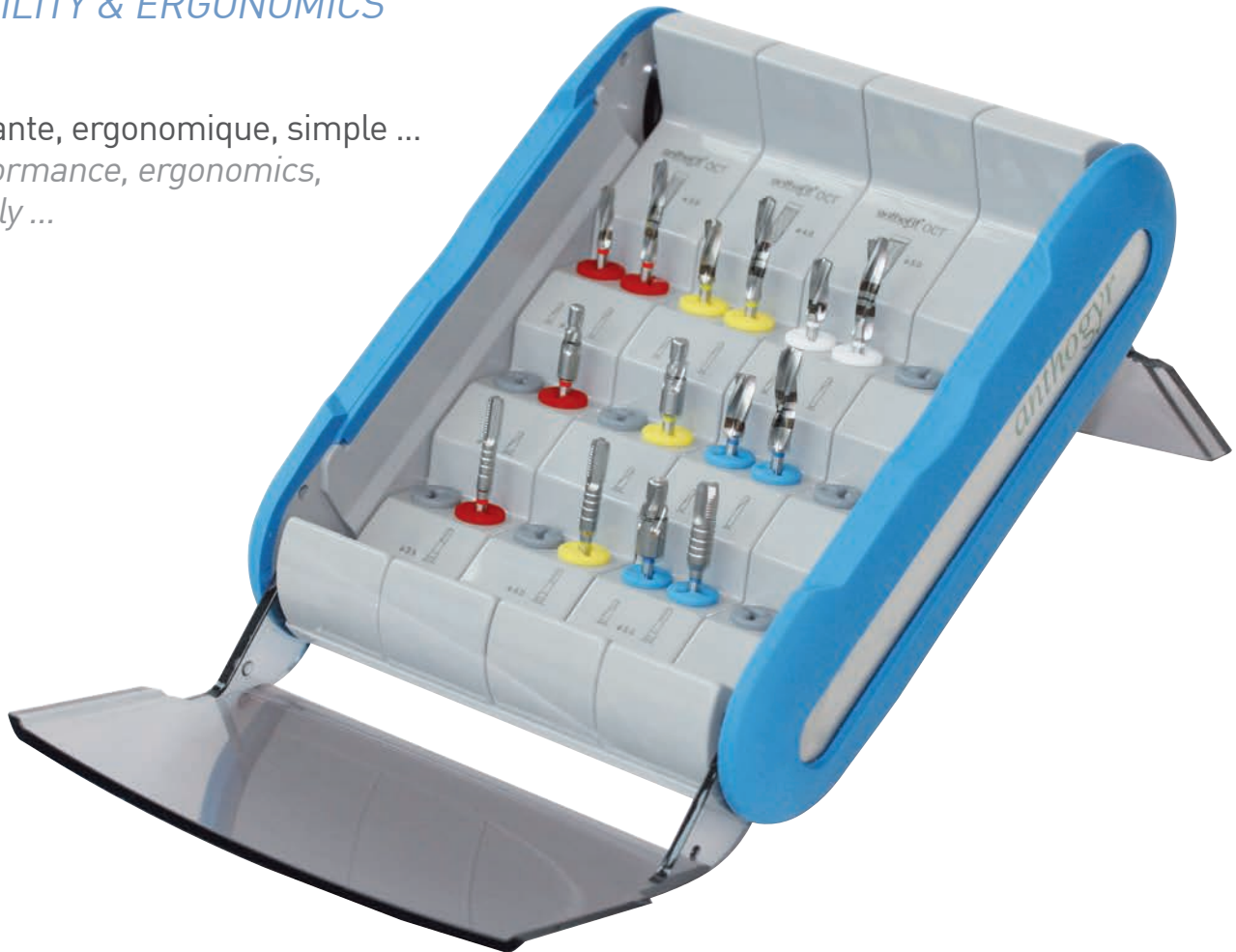


- Capot transparent pour une plus grande visibilité.
Transparent cover for better visibility.
- Protections latérales antidérapantes pour une meilleure stabilité de la trousse lors de la chirurgie.
Latéral non-slip protection for optimal stability of the kit during surgery.
- Joints silicones permettant un maintien à la fois souple et fiable des instruments.
Silicone joints : both smooth and safe retention of the instruments.
- Pictogrammes permettant une identification rapide des instruments.
Pictograms : quick identification of the instrument locations.
- Repérage facile des diamètres de forets grâce au code couleur des joints silicone.
Colour coding : easy identification of the final drill.
- Lignes élégantes sans angles vifs pour une prise en main agréable.
Modern design without sharp angles for optimal handgrip.
- Radel autoclavable et résistant aux chocs.
Made in radel. Resistant and long-lasting material.
- Barrettes amovibles permettant de segmenter les procédures de stérilisation.
Removable racks: possibility to segment the sterilization procedures.
- Rangement linéaire des forets afin de clarifier la lecture du protocole de forage.
Linear tidying up of the instruments for spontaneous reading of the protocols.
- Économie de place en autoclave grâce au format compact de la trousse.
Compact : optimize the space available in the autoclave.
- Préhension facile des instruments grâce au plateau inclinable.
Upward facing of the instruments for easy handling.

1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM

B. Ancillaire modulaire - *Modular ancillary equipment*

Le Module de base regroupe les forets initiaux, clés de vissage et instruments communs nécessaires à la pose des implants commercialisés par la société anthogyr. Module spécifique : regroupe les alésoirs et autres instruments coupants spécifiques à chaque système. Augmenter vos possibilités thérapeutiques par l'adjonction d'un système d'implant devient très simple grâce à l'ancillaire évolutif Anthofit®. Le simple ajout du boîtier spécifique vous ouvre de nouvelles perspectives sans alourdir de façon conséquente votre équipement initial.

The base Module contains the initial drills, screwing keys and common instruments required to position implants marketed by the anthogyr Company. Specific Module : contains the reamers and other cutting instruments specific to each system. Increasing your treatment options by adding an implant system becomes very straightforward because of the adaptable Anthofit® ancillary instruments. Simply adding the specific case offers you new opportunities without burdening your initial equipment.

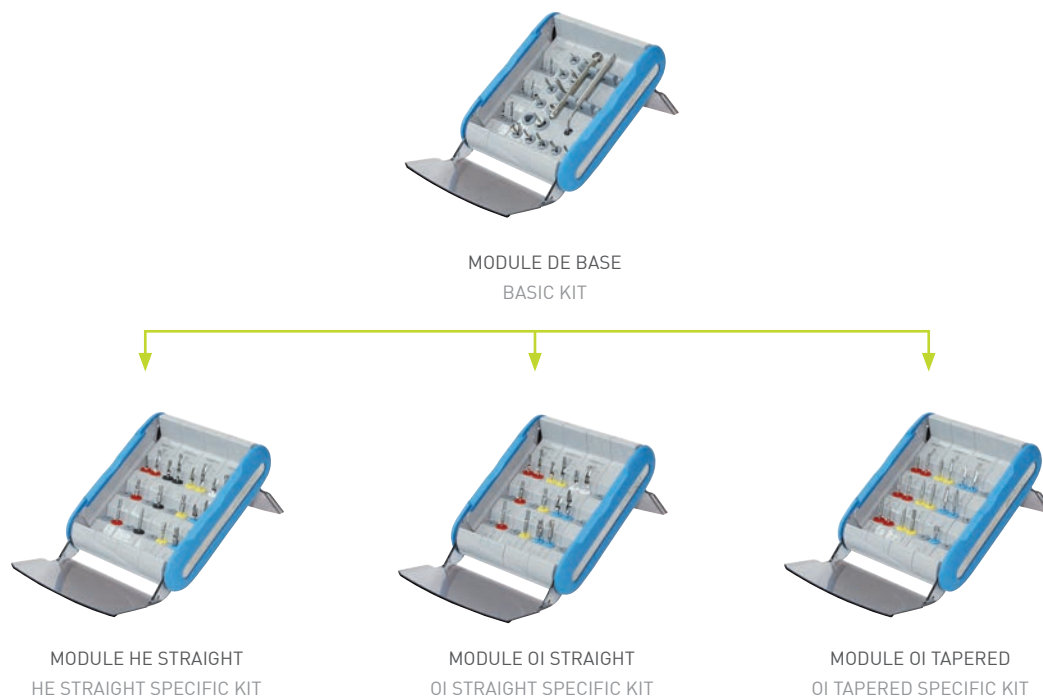



NOTA : l'ancillaire vous permet également d'évoluer vers le système Ossfit® également commercialisé par la société anthogyr.

NOTE : the ancillary instruments also allow you to evolve towards the Ossfit® system which is also marketed by the anthogyr Company.



SYNOPTIQUE PROTHÉTIQUE

PROSTHETICS OVERVIEW

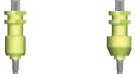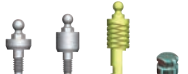
SYSTÈME / SYSTEM	ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>	
EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	IMPLANT ø 3.5 MM	IMPLANT ø 4.0 MM
VIS DE CICATRISATION p.26 HEALING SCREWS p.26		
TRANSFERTS PICK-UP p.28 PICK-UP TRANSFERS p.28		
TRANSFERTS REPOSITIONNABLES p.29 POP-IN TRANSFERS p.29		
ANALOGUES p.31 ANALOGS p.31		
MOIGNONS PROVISOIRES PEEK p.34 TEMPORARY ABUTMENTS PEEK p.34		
MOIGNONS TITANE DROITS TiN plus® p.37 TiNplus® STRAIGHT TITANIUM ABUTMENTS p.37		
MOIGNONS TITANE ANGULÉS TiN plus® p.37 TiNplus® ANGULATED TITANIUM ABUTMENTS p.37		
MOIGNONS ZIRCON Z plus® p.35 Z plus® ZIRCON ABUTMENTS p.35		
MOIGNONS SURCOULÉS-OR p.40 GOLD OVER-CASTABLE ABUTMENTS p.40		
MOIGNONS CALCINABLES p.40 CASTABLE ABUTMENTS p.40		
PILIER CONIQUES p.42 CONICAL ABUTMENTS p.42		
PARTIES SECONDAIRES p.43 SECONDARY PARTS p.43		
TRANSFERTS DE PILIER p.30 ABUTMENT'S TRANSFERS p.30		
ANALOGUES DE PILIER p.31 ABUTMENT'S ANALOGS p.31		
ATTACHEMENTS BOULE + DALBO® p.44 BALL ATTACHMENTS + DALBO® p.44		

1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM


red		ANTHOFIT® HE <i>straight</i>	
	IMPLANT ø 5.0 MM	R	L

DIAGRAMME PROTHÉTIQUE

PROSTHETICS DIAGRAM

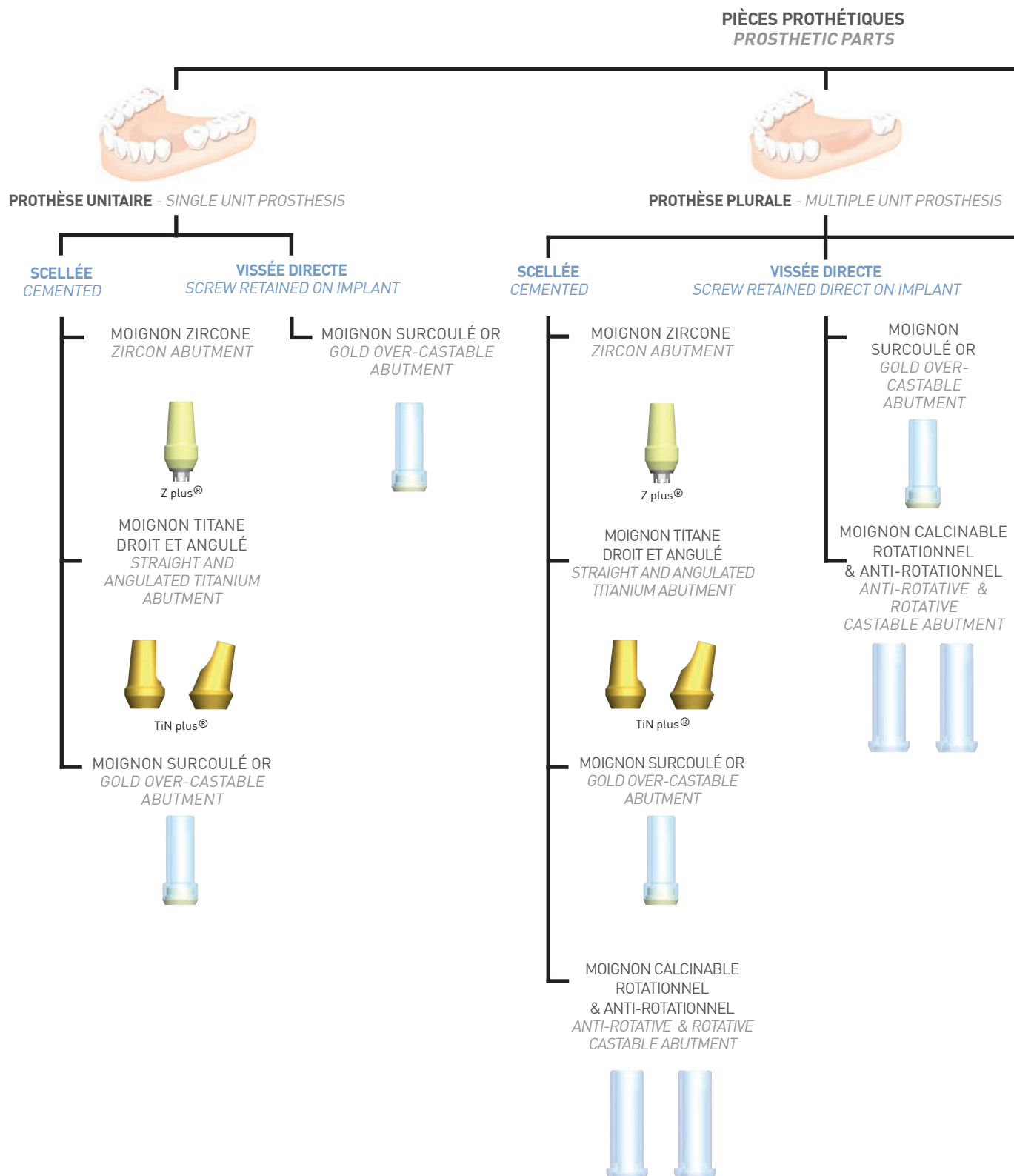


1. SYSTÈME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANT SYSTEM

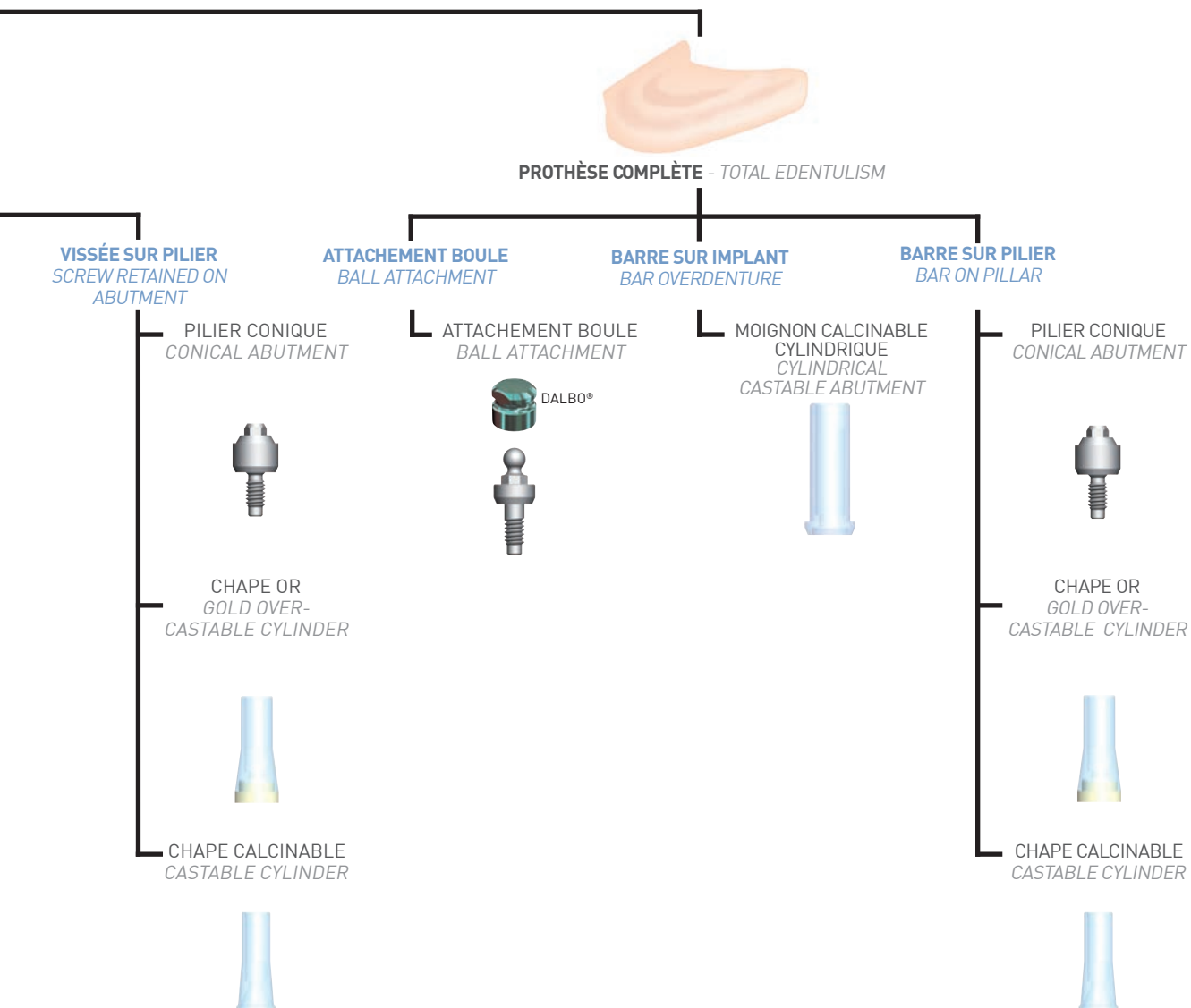

LA GAMME D'IMPLANTS
ANTHOFIT®

*THE ANTHOFIT®
IMPLANT RANGE*

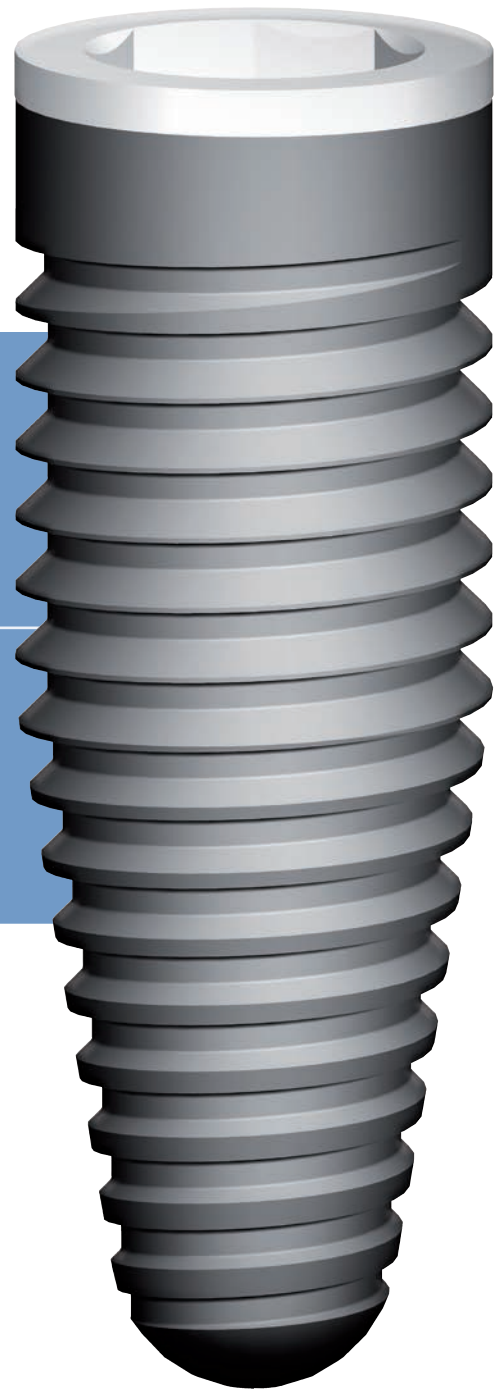

Implant Anthofit® OI tapered Full BCP®
Full BCP® Anthofit® OI tapered implant

2. GAMME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANTS RANGE



- **TITANE GRADE MÉDICAL.**
MEDICAL GRADE TITANIUM.
- **FILETAGE RAYONNÉ.**
THREAD WITHOUT SHARP ANGLE.
- **APEX ATRAUMATIQUE.**
ATRAUMATIC APEX.
- **CONNEXION OCTOGONE INTERNE (PROFONDEUR : 1.5 mm).**
INTERNAL OCTAGON CONNECTION (DEPTH : 1.5 mm).
- **COL FULL BCP® (HT : 0.4 mm) OU CLASSIQUE (HT : 1.5 mm).**
FULL BCP® NECK (HT: 0.4 MM) OR CLASSICAL (HT: 1.5 MM).
- **SURFACE SABLÉE BCP®.**
BCP® SANDED SURFACE.

IMPLANTS

IMPLANTS

ANTHOFIT® OI <i>straight</i>			
IMPLANTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	LONGUEURS LENGTHS	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OIIM35080 OIIM35100 OIIM35115 OIIM35130 OIIM35150
	 Ø 4.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OIIM40080 OIIM40100 OIIM40115 OIIM40130 OIIM40150
	 Ø 5.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm	OIIM50080 OIIM50100 OIIM50115 OIIM50130


Hauteur de col : 1,5 mm - Collar height : 1.5 mm.

ANTHOFIT® OI <i>straight</i> FULL BCP®			
IMPLANTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	LONGUEURS LENGTHS	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OIIM35080R OIIM35100R OIIM35115R OIIM35130R OIIM35150R
	 Ø 4.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OIIM40080R OIIM40100R OIIM40115R OIIM40130R OIIM40150R
	 Ø 5.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm	OIIM50080R OIIM50100R OIIM50115R OIIM50130R

Hauteur de col : 0.4 mm - Collar height : 0.4 mm.

ANTHOFIT® OI <i>tapered</i>			
IMPLANTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	LONGUEURS LENGTHS	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OICIM35080 OICIM35100 OICIM35115 OICIM35130 OICIM35150
	 Ø 4.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OICIM40080 OICIM40100 OICIM40115 OICIM40130 OICIM40150
	 Ø 5.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm	OICIM50080 OICIM50100 OICIM50115 OICIM50130

Hauteur de col : 1,5 mm - Collar height : 1.5 mm.

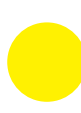
ANTHOFIT® OI <i>tapered</i> FULL BCP®			
IMPLANTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	LONGUEURS LENGTHS	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OICIM35080R OICIM35100R OICIM35115R OICIM35130R OICIM35150R
	 Ø 4.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	OICIM40080R OICIM40100R OICIM40115R OICIM40130R OICIM40150R
	 Ø 5.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm	OICIM50080R OICIM50100R OICIM50115R OICIM50130R

Hauteur de col : 0.4 mm - Collar height : 0.4 mm.

2. GAMME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANTS RANGE

ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
IMPLANTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	LONGUEURS LENGTHS	REFERENCES
Ø 3.5 	 Ø 4.1 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	HEIM35080 HEIM35100 HEIM35115 HEIM35130 HEIM35150
Ø 3.75 	 Ø 4.1 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	HEIM37080 HEIM37100 HEIM37115 HEIM37130 HEIM37150
Ø 4.0 	 Ø 4.1 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm	HEIM40080 HEIM40100 HEIM40115 HEIM40130 HEIM40150
Ø 5.0 	 Ø 5.0 mm	8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm	HEIM50080 HEIM50100 HEIM50115 HEIM50130

Hauteur de col : 1.5 mm - Collar height : 1.5 mm.

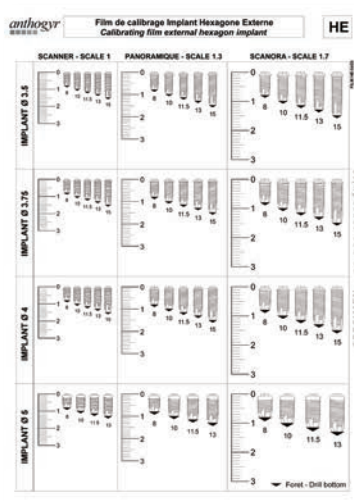

Réf. NOT FCH

Afin d'éviter les erreurs d'échelle, ce document ne doit pas être reproduit.

To avoid scaling errors, this foil must not be copied.

FILM DE CALIBRAGE
X-RAY'S SHEETS

Réf. NOT FCC

Réf. NOT FCO

Réf. NOT FCH

Réf. NOT IMPLANT 3

Réf. NOT IMPLANT 4

ANTHOFIT® OI tapered

ANTHOFIT® OI straight

ANTHOFIT® HE straight

Manuel de chirurgie ANTHOFIT®
ANTHOFIT® surgical guide


Manuel de prothétique ANTHOFIT®
ANTHOFIT® prosthetic guide

VIS DE CICATRISATION


HEALING SCREWS

- Choisir la vis en respectant le principe du profil d'émergence constant - *Choose the screw following the principle of the constant emergence profile.*
- Disponible en version cylindrique et conique - *Available in cylindrical and conical version.*
- Utilisable pour la technique de chirurgie en 1 temps - *Can be used for 1 surgical step.*

ANTHOFIT® OI <i>straight & TAPERED</i>			
VIS DE CICATRISATION HEALING SCREWS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
		Ø 4.3 mm h = 4 mm	OIPC001
		Ø 4.3 mm h = 6 mm	OIPC002
		Ø 5.4 mm h = 3 mm	OIPC003
		Ø 5.4 mm h = 5 mm	OIPC004
		Ø 5.4 mm h = 7 mm	OIPC005
		Ø 4.8 mm h = 4 mm	OIPC006
		Ø 4.8 mm h = 6 mm	OIPC007
		Ø 5.9 mm h = 3 mm	OIPC008
		Ø 5.9 mm h = 5 mm	OIPC009
		Ø 5.9 mm h = 7 mm	OIPC010
		Ø 6.9 mm h = 3 mm	OIPC011
		Ø 6.9 mm h = 5 mm	OIPC012
		Ø 5.7 mm h = 4 mm	OIPC013
		Ø 5.7 mm h = 6 mm	OIPC014

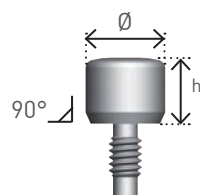

FORMAT CYLINDRIQUE
CYLINDRICAL SHAPE

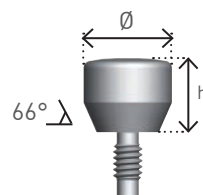

FORMAT CONIQUE
CONICAL SHAPE

ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
VIS DE CICATRISATION HEALING SCREWS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
		Ø 4.9 mm h = 3 mm	HEPC001
		Ø 4.9 mm h = 4 mm	HEPC002
		Ø 4.9 mm h = 5.5 mm	HEPC003
		Ø 6.0 mm h = 3 mm	HEPC004
		Ø 6.0 mm h = 5 mm	HEPC005
		Ø 6.9 mm h = 3 mm	HEPC006
		Ø 6.9 mm h = 4 mm	HEPC007
		Ø 5.7 mm h = 4 mm	HEPC008
		Ø 5.7 mm h = 6 mm	HEPC009

STERILE

R

Pièce livrée stérile - Part supplied sterile



Serrage manuel - Screwed manually



Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47

2. GAMME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANTS RANGE

TRANSFERTS ET ANALOGUES

TRANSFERS AND ANALOGS

Le choix du transfert approprié est déterminé par le niveau d'enregistrement souhaité.

Celui-ci peut être :

- au niveau de l'implant
- au niveau du pilier conique.

Pour la prise d'empreinte sur implant, les transferts sont proposés en version pick-up ou repositionnable, de profil conique ou cylindrique.


The choice of the right impression-coping is determined by the level of recording one wish to attain.

It can either be :

- at implant's level*
- at conical abutment's level.*

For impression coping at implant level, transfers are proposed as pick-up or pop-in version, with conical or cylindrical shape.

CHOIX DES TRANSFERTS - SELECTION OF THE TRANSFERS

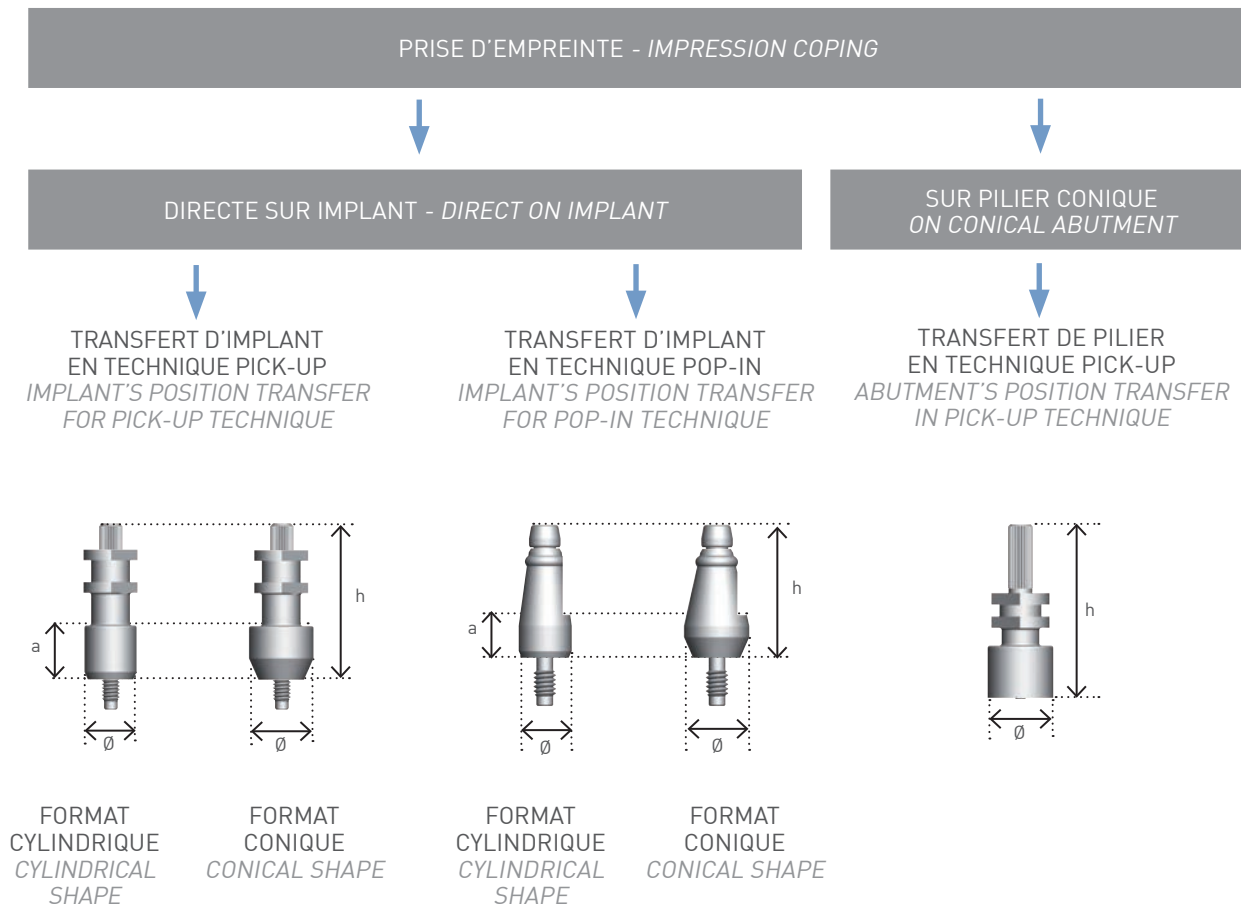

TRANSFERTS D'EMPREINTE DIRECTE SUR IMPLANTS EN TECHNIQUE PICK-UP

DIRECT ON IMPLANT IMPRESSION TRANSFER WITH THE PICK-UP TECHNIQUE

- Utilisation avec un PEI (porte empreinte individuel) à ciel ouvert
Use with an open tray IIC (individual imprint carrier).
- Technique recommandée avec les restaurations de type armature sur plusieurs implants
Technique recommended for bracing restorations over several implants.
- Pour plus de précision, possibilité de solidariser les transferts entre eux au moment de la prise d'empreinte
For increased precision, transfers can be fixed together during impression taking.

ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>				ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
TRANSFERTS PICK-UP PICK-UP TRANSFERS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES	TRANSFERTS PICK-UP PICK-UP TRANSFERS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
 	 Ø 3.5 mm	h = 15.6 mm Ø 5.4 mm a = 4.5 mm	OITR001	 	 Ø 4.1 mm	h = 16.9 mm Ø 6.0 mm a = 5.0 mm	HETR001
		h = 15.6 mm Ø 4.3 mm a = 4.5 mm	OITR002			h = 16.9 mm Ø 4.9 mm a = 5.0 mm	HETR002
 	 Ø 4.0 mm	h = 15.6 mm Ø 5.9 mm a = 4.5 mm	OITR003	 	 Ø 5.0 mm	h = 16.9 mm Ø 6.9 mm a = 5.0 mm	HETR003
		h = 15.6 mm Ø 4.8 mm a = 4.5 mm	OITR004			h = 16.9 mm Ø 5.7 mm a = 5.0 mm	HETR009
 	 Ø 5.0 mm	h = 15.6 mm Ø 6.9 mm a = 4.5 mm	OITR005	 Pièce livrée non stérile - <i>Part supplied non sterile</i>  Serrage manuel - <i>Screwed manually</i>			
		h = 15.6 mm Ø 5.7 mm a = 4.5 mm	OITR022				

2. GAMME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANTS RANGE

TRANSFERTS D'EMPREINTE DIRECTE SUR IMPLANTS EN TECHNIQUE POP-IN

DIRECT ON IMPLANT IMPRESSION TRANSFER WITH THE POP-IN TECHNIQUE


- Utilisable avec les portes-empreintes du commerce (rigide)
Can be used with commercial imprint carriers (rigid).
- Bien respecter l'orientation des méplats lors de la réinsertion des transferts dans l'empreinte
Correctly observe the direction of the offsets when re-inserting transfers into the imprint.
- Un clic de repositionnement garantit que le transfert a bien été ré-inséré à fond
A repositioning click guarantees that transfer has been correctly and fully reinserted.

ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>				ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
TRANSFERTS REPOSITIONNABLES POP-IN TRANSFERS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES	TRANSFERTS REPOSITIONNABLES POP-IN TRANSFERS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
 	 Ø 3.5 mm	h = 11.0 mm Ø 5.4 mm a = 3.0 mm h = 11.0 mm Ø 4.3 mm a = 3.0 mm	OITR006 OITR007	 	 Ø 4.1 mm	h = 12.0 mm Ø 6.0 mm a = 3.0 mm h = 12.0 mm Ø 4.9 mm a = 3.0 mm	HETR004 HETR005
 	 Ø 4.0 mm	h = 11.0 mm Ø 5.9 mm a = 3.0 mm h = 11.0 mm Ø 4.8 mm a = 3.0 mm	OITR008 OITR009	 	 Ø 5.0 mm	h = 12.0 mm Ø 6.93 mm a = 3.0 mm h = 12.0 mm Ø 5.7 mm a = 3.0 mm	HETR006 HETR010
 	 Ø 5.0 mm	h = 11.0 mm Ø 6.9 mm a = 3.0 mm h = 11.0 mm Ø 5.7 mm a = 3.0 mm	OITR010 OITR023	 Pièce livrée non stérile - <i>Part supplied non sterile</i>  Serrage manuel - <i>Screwed manually</i>			

TRANSFERTS DE PILIER CONIQUE EN TECHNIQUE PICK-UP

CONICAL ABUTMENT IMPRESSION COPINGS

- Utilisation avec un PEI (porte empreinte individuel) à ciel ouvert
Use with an open tray IIC (individual implant carrier).
- Technique recommandée avec les restaurations de type armature sur plusieurs implants
Technique recommended for bracing restorations over several implants.
- Pour plus de précision, possibilité de solidariser les transferts entre eux au moment de la prise d'empreinte.
For increased precision, transfers can be fixed together during impression taking.

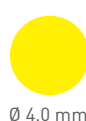ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>				ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
TRANSFERT DE PILIER CONIQUE CONICAL ABUTMENT IMPRESSION COPING	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES	TRANSFERT DE PILIER CONIQUE CONICAL ABUTMENT IMPRESSION COPING	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	h = 14.9 mm Ø 4.1 mm	OITR018		 Ø 4.1 mm	h = 14.9 mm Ø 4.7 mm	HETR007
	 Ø 4.0 mm	h = 14.9 mm Ø 4.7 mm	OITR019		 Ø 5.0 mm	h = 14.9 mm Ø 5.7 mm	HETR008
	 Ø 5.0 mm	h = 14.9 mm Ø 5.7 mm	OITR021	 Pièce livrée non stérile - Part supplied non sterile			



Serrage manuel - Screwed manually





Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47

2. GAMME D'IMPLANTS ANTHOFIT® - ANTHOFIT® IMPLANTS RANGE

ANALOGUES D'IMPLANTS ET ANALOGUES DE PILIERS

IMPLANT'S ANALOGS AND PILLAR'S ANALOGS

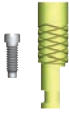ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>		
ANALOGUES D'IMPLANT IMPLANT'S ANALOGS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	OIAN001
	 Ø 4.0 mm	OIAN002
	 Ø 5.0 mm	OIAN003

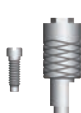ANTHOFIT® HE <i>straight</i>		
ANALOGUES D'IMPLANT IMPLANT'S ANALOGS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	REFERENCES
	 Ø 4.1 mm	HEAN001
	 Ø 5.0 mm	HEAN002

Analogues d'implants disponibles à l'unité ou par lot de 3 (voir tarif / réf.)

Implant's analogs available in one or three units (see price lists for references)

ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>		
ANALOGUES DE PILIER PILLAR'S ANALOGS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	OIAN004
	 Ø 4.0 mm	OIAN005
	 Ø 5.0 mm	OIAN009

ANTHOFIT® HE <i>straight</i>		
ANALOGUES DE PILIER PILLAR'S ANALOGS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	REFERENCES
	 Ø 4.1 mm	HEAN005
	 Ø 5.0 mm	HEAN006



Pièce livrée non stérile - Part supplied non sterile

COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE

PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS



Moignon Zircone Z plus®
Zircon Z plus® abutment

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS




- TEINTE ÉCRUE POUR UN RENDU PLUS NATUREL.
ECRU SHADE FOR A MORE NATURAL APPEARANCE.
- MOIGNON RÉSISTANT EN ZIRCON YTTRIÉE.
RESISTANT ABUTMENT MADE OF YTTRIATED ZIRCON.
- MOIGNON PERSONNALISABLE AU LABORATOIRE.
ABUTMENT CAN BE PERSONALISED IN THE LABORATORY.
- ÉLIMINE LES REFLETS GINGIVAUX BLEUTÉS.
ELIMINATES BLUE COLORED GUM REFLECTIONS.




MOIGNONS PROVISOIRES PEEK

TEMPORARY ABUTMENTS PEEK

Le passage par un moignon provisoire est fortement recommandé dans les secteurs à visée esthétique. Il permet non seulement de valider le projet prothétique auprès du patient mais également de guider la maturation des tissus mous avant la mise en place de la prothèse définitive.

The use of a temporary abutment is highly recommended in aesthetic sectors. The abutment not only allows the initial prosthesis to be confirmed with the patient but also to guide maturation of soft tissues before positioning the final implant.

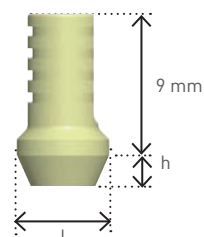

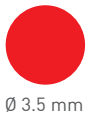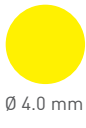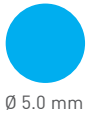ANTHOFIT® OI straight & tapered			
MOIGNONS PROVISOIRE TEMPORARY ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	h = 3 mm l : 5.2 mm	OIPE001
	 Ø 4.0 mm	h = 3 mm l : 5.8 mm	OIPE002
	 Ø 5.0 mm	h = 2 mm l : 5.9 mm	OIPE003

ANTHOFIT® HE straight			
MOIGNONS PROVISOIRE TEMPORARY ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
	 Ø 4.1 mm	h = 3 mm l : 5.8 mm	HEPE001
	 Ø 5.0 mm	h = 2 mm l : 5.9 mm	HEPE002




Serrage 35 N.cm - Tightening 35 N.cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES


- PEEK biocompatible.
Biocompatible PEEK.
- Retouchable directement au fauteuil.
Can be directly re-worked in the operating chair.
- Permet de supporter une prothèse en résine pendant une période maximale de 30 jours.
Supports a resin prosthesis for an initial period of 30 days.
- Prothèse provisoire transvissable afin de faciliter les manipulations.
The temporary transvisible prosthesis to facilitate manipulation.



Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47

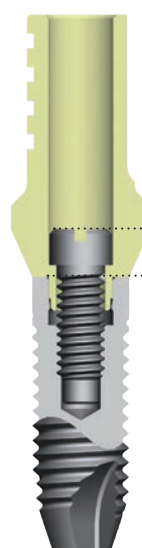

ANTHOFIT® OI

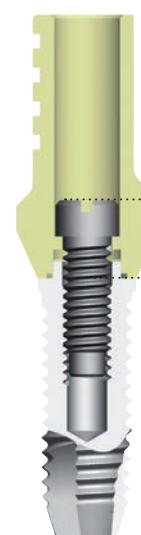

ANTHOFIT® HE

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS

MOIGNONS ZIRCON Z PLUS®

Z PLUS® ZIRCON ABUTMENTS



ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>				ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
MOIGNON ZIRCON ZIRCON ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES	MOIGNON ZIRCON ZIRCON ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	h = 2 mm l : 5.2 mm	OICE001		 Ø 4.1 mm	h = 2 mm l : 5.8 mm	HECE001
	 Ø 4.0 mm	h = 2 mm l : 5.8 mm	OICE002		 Ø 5.0 mm	h = 2 mm l : 6.8 mm	HECE002
	 Ø 5.0 mm	h = 2 mm l : 6.8 mm	OICE003				




Serrage 35 N.cm - Tightening 35 N.cm

VIS BLACK TITE® DE FIXATION DE PROTHÈSE M2
BLACK TITE® ABUTMENT FIXING SCREW M2


Destinée uniquement pour le vissage définitif. Utiliser la vis livrée avec l'analogue pour les vissages d'essai.
Only intended for final screwing.
Use the screw provided with the analogue for test screwing.

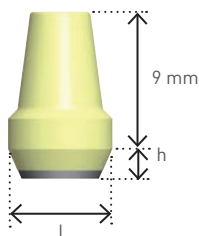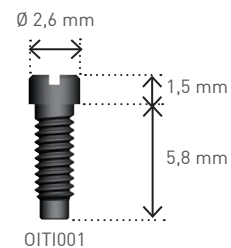CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL FEATURES

- Moignon en zircon Yttrié résistante.
Abutment made of resistant Yttriated zircon with low risk of fissuring.
- Teinte écrue pour un rendu plus naturel.
Ecrú shade for more natural appearance.
- Moignon retouchable au laboratoire sous abondante irrigation.
Abutment can be reworked in the lab with generous irrigation.
- Interface titane livrée non collée pour permettre des rajouts de céramique directement sur le moignon.
Titanium interface delivered non-affixed to enable addition of ceramic directly onto the abutment.
- Réservé à l'utilisation sur secteur esthétique.
Reserved for use in the aesthetic sector.
- Contre-indiqué sur les secteurs molaires.
Contra-indicated in the molar sectors.

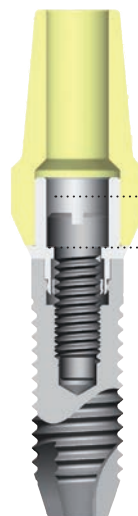 Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47


ANTHOFIT® OI

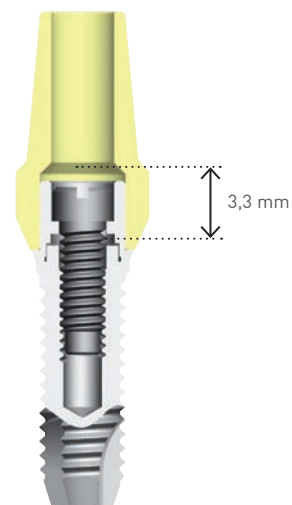


ANTHOFIT® HE

MOIGNONS TITANE TIN PLUS®

TITANIUM TIN PLUS® ABUTMENT

Le TiN plus® peut être utilisé pour les restaurations unitaires, plurales ou complètes scellées.
Chaque moignon est fourni avec sa vis de fixation Black Tite®.



*The TiN plus™ can be used for single or multiple unit in cemented restorations.
Each abutment is supplied with its Black Tite® fixing screw.*

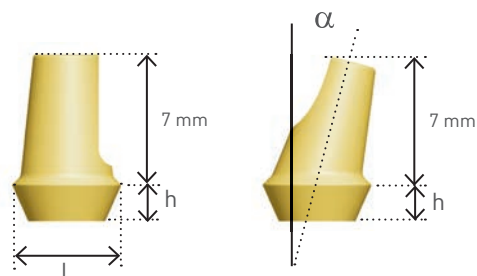

VIS BLACK TITE® DE FIXATION DE PROTHÈSE M2 BLACK TITE® abutment fixing screw M2



Destinée uniquement pour le vissage définitif. Utiliser la vis livrée avec l'analogue pour les vissages d'essayage.
Only intended for final screwing. Use the screw provided with the analogue for test screwing.

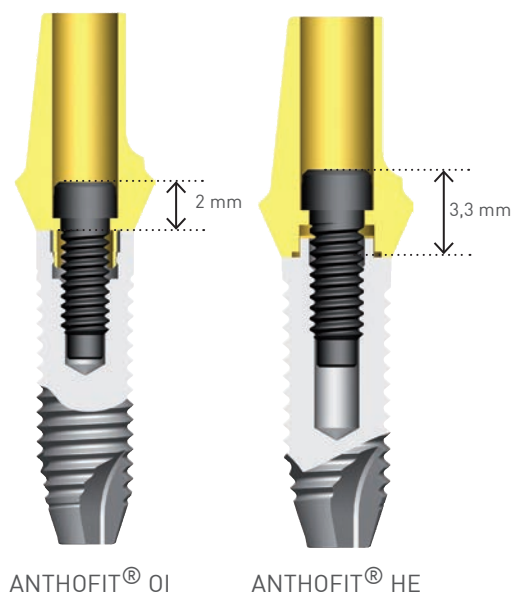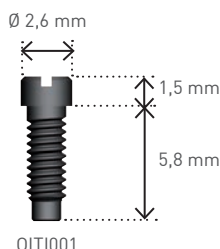

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

- TA6V.
- Bio-compatibilité élevée.
High biocompatibility.
- Retouchable.
Reworkable.
- Angulation maximum tolérée pour les moignons droits : 10° - Au delà, préférer un moignon titane angulé ou un moignon or surcoulable.
Maximum tolerated angulation for the straight abutment : 10°. Beyond that value, a gold over-castable abutment is advisable.
- Espace minimum inter-arcade nécessaire : 7 mm. En deçà, préférer un moignon or surcoulable (prothèse vissée directe).
Minimum distance between the two archs : 7 mm. Below this distance over-castable abutment is advisable (screw retained prosthesis direct on implant).
- Idéal avec les parodontes plats et épais d'une profondeur de 1 à 5 mm.
Ideal with flat and thick gingiva, from 1 to 5 mm depth.
- Coloration TiN (biocompatible) : réduction du risque de visibilité sous gingivale avec parodonte fin.
TiN coating (biocompatible) : reduction of the risk of under gingival visibility through periodontium.
- Epaulements retouchables pour adaptation aux variations de contours gingivaux.
Collars can be modified to enable adaptation to the variations of gingival shapes.
- Epaulement progressif pour une meilleure répartition du ciment de scellement.
Progressive collar for a better spreading of the cement.
- Chape de surcoulée calcifiable : disponible pour les moignons droits (p. 38).
Over-castable coping: available for the straight abutments (p. 38).

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS

ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>			
MOIGNONS TITANE TITANIUM ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
		h = 1 mm l = 4.55 mm	OIT1009
		h = 2 mm l = 5.3 mm	OIT1010
		h = 3 mm l = 5.3 mm	OIT1011
		h = 1 mm l = 4.55 mm $\alpha = 15^\circ$	OIT1017
		h = 2 mm l = 5.3 mm $\alpha = 15^\circ$	OIT1018
		h = 1 mm l = 4.55 mm $\alpha = 25^\circ$	OIT1019
		h = 1 mm l = 5.1 mm	OIT1012
		h = 2 mm l = 5.8 mm	OIT1013
		h = 3 mm l = 5.8 mm	OIT1014
		h = 1 mm l = 5.1 mm $\alpha = 15^\circ$	OIT1020
		h = 2 mm l = 5.8 mm $\alpha = 15^\circ$	OIT1021
		h = 1 mm l = 5.1 mm $\alpha = 25^\circ$	OIT1022
		h = 1 mm l = 6.1 mm	OIT1015
		h = 2 mm l = 6.8 mm	OIT1016
		h = 1 mm l = 6.1 mm $\alpha = 15^\circ$	OIT1023
		h = 2 mm l = 6.8 mm $\alpha = 15^\circ$	OIT1024
		h = 1 mm l = 6.1 mm $\alpha = 25^\circ$	OIT1025

ANTHOFIT® HE <i>STRAIGHT</i>			
MOIGNONS TITANE TITANIUM ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
		h = 1 mm l = 5.1 mm	HET1008
		h = 2 mm l = 5.8 mm	HET1009
		h = 3 mm l = 5.8 mm	HET1010
		h = 1 mm l = 5.1 mm $\alpha = 15^\circ$	HET1012
		h = 2 mm l = 5.8 mm $\alpha = 15^\circ$	HET1013
		h = 1 mm l = 5.3 mm $\alpha = 25^\circ$	HET1014
		h = 2 mm l = 5.8 mm $\alpha = 25^\circ$	HET1015
		h = 2 mm l = 6.8 mm	HET1011
		h = 2 mm l = 6.8 mm $\alpha = 15^\circ$	HET1016
		h = 2 mm l = 6.8 mm $\alpha = 25^\circ$	HET1017



Pièce livrée non stérile - Part supplied non sterile



Serrage 35 N.cm - Tightening 35 N.cm

CHAPES CALCINABLES POUR MOIGNONS DROITS

CASTABLES CAPS FOR STRAIGHT ABUTMENTS

Les chapes calcinables sont utilisables sur les moignons Titane droits TiN plus® lorsque la collerette n'a pas été retouchée. Elles permettent la réalisation d'un rebord précis de la couronne prothétique metallo-céramique. Se référer au tableau ci-dessous pour sélectionner la chape compatible avec le moignon Titane correspondant. Les chapes sont fournies en version rotationnelle  ou anti-rotationnelle .

The castables preparation copings can be used for the TiN plus® straight Titanium abutments when the collar has not been reworked. It allows for a precise realization of the edge of the metal-ceramics prosthetic crown. Refer to the table to select the castable cap compatible with the matching straight Titanium abutment. Copings are provided in rotational  or anti-rotational  version.

CHAPE ROTATIONNELLE - ROTATIONAL CAP

CHAPE CALCINABLE PREPARATING COPING						
REFERENCES	OITI026	OITI027	OITI028	OITI029	OITI030	OITI031
COMPATIBILITÉ MOIGNON TITANE OI COMPATIBILITY WITH THE OI TITANIUM ABUTMENTS	 OITI009	  OITI010 OITI011	 OITI012	  OITI013 OITI014	 OITI015	 OITI016
COMPATIBILITÉ MOIGNON TITANE HE COMPATIBILITY WITH THE HE TITANIUM ABUTMENTS			 HETI008	  HETI009 HETI010		 HETI011

CHAPE ANTI-ROTATIONNELLE - ANTI-ROTATIONAL CAP


CHAPE CALCINABLE PREPARATING COPING						
REFERENCES	OITI032	OITI033	OITI034	OITI035	OITI036	OITI037
COMPATIBILITÉ MOIGNON TITANE OI COMPATIBILITY WITH THE OI TITANIUM ABUTMENTS	 OITI009	  OITI010 OITI011	 OITI012	  OITI013 OITI014	 OITI015	 OITI016
COMPATIBILITÉ MOIGNON TITANE HE COMPATIBILITY WITH THE HE TITANIUM ABUTMENTS			 HETI008	  HETI009 HETI010		 HETI011

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS

MOIGNONS D'ESSAYAGE

FITTING ABUTMENTS

Permettent de sélectionner le moignon TiN plus® le mieux adapté à la situation.
Allow to select the most suitable TiN plus® abutment.

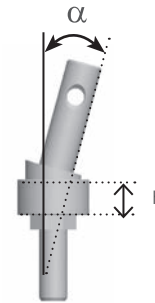

ANTHOFIT® OI straight & tapered		
MOIGNONS D'ESSAYAGE FITTING ABUTMENTS	FORMAT	REFERENCES
	h = 1.0 mm	OITI003
	h = 2.0 mm	OITI004
	h = 3.0 mm	OITI005
	h = 1.0 mm $\alpha = 15^\circ$	OITI006
	h = 2.0 mm $\alpha = 15^\circ$	OITI007
	h = 1.0 mm $\alpha = 25^\circ$	OITI008
Kit complet comprenant les 6 moignons d'essayage Complete kit including the 6 fitting abutments		KIT OI ESS

ANTHOFIT® HE straight		
MOIGNONS D'ESSAYAGE FITTING ABUTMENTS	FORMAT	REFERENCES
	h = 1.0 mm	HETI001
	h = 2.0 mm	HETI002
	h = 3.0 mm	HETI003
	h = 1.0 mm $\alpha = 15^\circ$	HETI004
	h = 2.0 mm $\alpha = 15^\circ$	HETI005
	h = 1.0 mm $\alpha = 25^\circ$	HETI006
	h = 2.0 mm $\alpha = 25^\circ$	HETI007
Kit complet comprenant les 7 moignons d'essayage Complete kit including the 7 fitting abutments		KIT HE ESS



Moignons d'essayage ANTHOFIT® OI communs pour les embases R et L (implants Ø 3.5 mm / 4.0 mm et 5.0 mm).
ANTHOFIT® OI trial abutments, common for the R and L platforms (implants Ø 3.5 mm / 4.0 mm and 5.0 mm).



Moignons d'essayage ANTHOFIT® HE communs pour les embases R et L (implants Ø 3.5 mm / 3.75 mm / 4.0 mm et 5.0 mm).
ANTHOFIT® HE trial abutments, common for the R and L platforms (implants Ø 3.5 mm / 3.75 mm / 4.0 mm and 5.0 mm).

MOIGNONS SURCOULÉS-OR ET CALCINABLES

GOLD OVER-CASTABLE ABUTMENTS AND CASTABLE ABUTMENTS

Le moignon surcoulable-or peut être utilisé pour la réalisation de moignons personnalisés en prothèse scellée ou vissée directe, unitaire ou plurale.



The gold over-castable abutment can be used for custom abutment realization for cemented or screw retained direct on implant, for single or multiple unit restorations.

VIS BLACK TITE® DE FIXATION DE PROTHÈSE M2 BLACK TITE® ABUTMENT FIXING SCREW M2



Destinée uniquement pour le vissage définitif. Utiliser la vis livrée avec l'analogue pour les vissages d'essayage.

Only intended for final screwing. Use the screw provided with the analogue for test screwing.

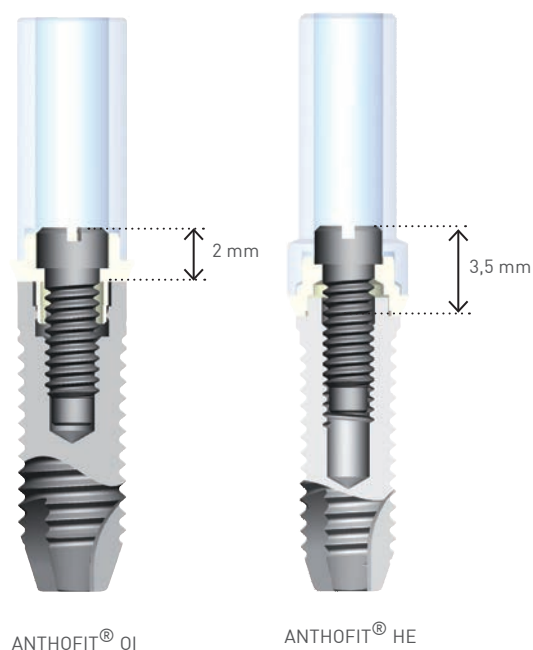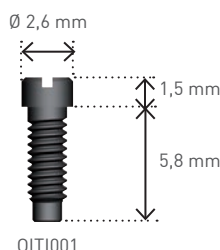

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

- Pivozyl (Au 8%, Ag 37%, Pt 25%, Pd 30% / intervalle de fusion 1285 - 1355°C).
Pivozyl (Au 8%, Ag 37%, Pt 25%, Pd 30% / Melting range 1285 - 1355°C).
- Idéal avec les gencives d'une hauteur maximum de 3 mm. Au-delà, préférer l'utilisation de matériaux hautement biocompatibles (TiN plus®).
Ideal with gingiva with a maximum height of 3 mm. Beyond, the use of highly biocompatible materials is advised (TiN plus®).
- Espace inter-arcade minimum nécessaire : 7 mm en prothèse scellée et 4.5 mm en prothèse vissée.
Minimum necessary distance between the two archs : 7 mm for cemented prosthesis and 4.5 mm for retained prosthesis.
- Idéal avec les parodontes fins et festonnés, ce type de moignon permet de modeler la portion transgingivale de manière anatomique.
Ideal with the thin and festooned periodontium, this type of abutment makes it possible to model the anatomical transgingival portion in an anatomical way.

Remarque : l'utilisation des moignons 100% calcinables n'est pas recommandée en prothèse unitaire.
Note: use of the 100% castable abutments is not recommended for single unit prosthesis.



Pièce livrée non stérile - Part supplied non sterile

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS

ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>			
MOIGNONS SURCOULÉ-OR GOLD OVER-CASTABLE ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	VERSION	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm		OIOR001
	 Ø 4.0 mm		OIOR002
	 Ø 5.0 mm		OIOR003

ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
MOIGNONS SURCOULÉ-OR GOLD OVER-CASTABLE ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	VERSION	REFERENCES
	 Ø 4.1 mm		HEOR001
	 Ø 5.0 mm		HEOR002

Version rotationnelle - Rotational version.

Version anti-rotationnelle - Anti-rotational version.

ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>			
MOIGNONS 100% CALCINABLES * 100% CASTABLE ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	VERSION	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	 	OICA001 OICA002
	 Ø 4.0 mm	 	OICA003 OICA004
	 Ø 5.0 mm	 	OICA006 OICA007

ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
MOIGNONS 100% CALCINABLES * 100% CASTABLE ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	VERSION	REFERENCES
	 Ø 4.1 mm	 	HECA001 HECA002
	 Ø 5.0 mm	 	HECA003 HECA004

*Disponibles à l'unité ou par lot de 6 (voir tarif / réf.)
Available in one or six units (see price lists for references)

Serrage 35 N.cm - Tightening 35 N.cm


Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47

PILIERS CONIQUES

CONICAL ABUTMENTS

Le pilier conique a été conçu pour la réalisation de prothèses vissées plurales ou complètes sur barre.

The conical abutment was designed for multiple unit screw-retained or bar-overdenture prosthesis.

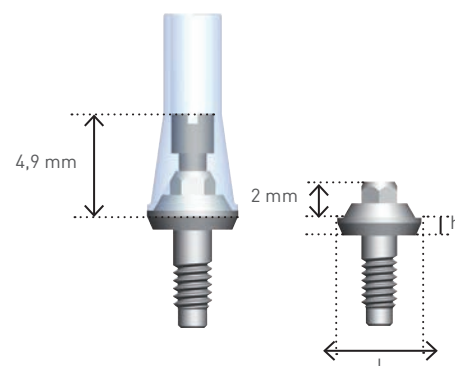

ANTHOFIT® OI straight & tapered				ANTHOFIT® HE straight			
PILIERS CONIQUES CONICAL ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES	PILIERS CONIQUES CONICAL ABUTMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
		h = 1.0 mm l = 4.1 mm	OIC0002			h = 1.0 mm l = 4.7 mm	HEC0001
		h = 3.0 mm l = 4.1 mm	OIC0004			h = 3.0 mm l = 4.7 mm	HEC0002
		h = 5.0 mm l = 4.1 mm	OIC0006			h = 5.0 mm l = 4.7 mm	HEC0003
		h = 1.0 mm l = 4.7 mm	OIC0001			h = 1.0 mm l = 5.7 mm	HEC0009
		h = 3.0 mm l = 4.7 mm	OIC0003			h = 3.0 mm l = 5.7 mm	HEC0010
		h = 5.0 mm l = 4.7 mm	OIC0005			h = 5.0 mm l = 5.7 mm	HEC0011
		h = 1.0 mm l = 5.7 mm	OIC0019	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES → TA6V. → Bio-compatibilité élevée. <i>High biocompatibility.</i> → Conçu pour la réalisation de bridge ou d'armatures vissées. <i>Designed for bridge or screw retained frames.</i>			
		h = 3.0 mm l = 5.7 mm	OIC0020				
		h = 5.0 mm l = 5.7 mm	OIC0021				

Transferts et analogues pour pilier conique : cf p. 30 et 31
 Conical abutment and pillar's analog : cf p.30 et 31.



Pièce livrée non stérile - Part supplied non sterile



Serrage 35 N.cm - Tightening 35 N.cm




Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS

PARTIES SECONDAIRES

SECONDARY PARTS

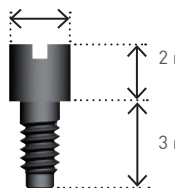ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>				ANTHOFIT® HE <i>straight</i>			
PARTIES SECONDAIRES SECONDARY PARTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	PIÈCE PART	REFERENCES	PARTIES SECONDAIRES SECONDARY PARTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	PIÈCE PART	REFERENCES
   	 Ø 3.5 mm	Chape calcinable <i>Castable cylinder</i>	OIC0010	   	 Ø 4.1 mm	Chape calcinable <i>Castable cylinder</i>	OIC0009
		Chape or <i>Gold cylinder</i>	OIC0011			Chape or <i>Gold cylinder</i>	OIC0013
		Capuchon <i>Cap</i>	OIC0016			Capuchon <i>Cap</i>	OIC0015
		Pilier provisoire <i>Temporary cylinder</i>	OIC0008			Pilier provisoire <i>Temporary cylinder</i>	OIC0007
   	 Ø 4.0 mm	Chape calcinable <i>Castable cylinder</i>	OIC0009	   	 Ø 5.0 mm	Chape calcinable <i>Castable cylinder</i>	OIC0024
		Chape or <i>Gold cylinder</i>	OIC0013			Chape or <i>Gold cylinder</i>	OIC0025
		Capuchon <i>Cap</i>	OIC0015			Capuchon <i>Cap</i>	OIC0022
		Pilier provisoire <i>Temporary cylinder</i>	OIC0007			Pilier provisoire <i>Temporary cylinder</i>	OIC0023
   	 Ø 5.0 mm	Chape calcinable <i>Castable cylinder</i>	OIC0024	 Serrage 15 N.cm - Tightening 15 N.cm VIS BLACK TITE® DE FIXATION DE PROTHÈSE M1.4 M1.4 BLACK TITE® ABUTMENT FIXING SCREW  Destinée uniquement pour le vissage définitif. Utiliser la vis livrée avec l'analogue pour les vissages d'essayage. Only intended for final screwing. Use the screw provided with the analogue for test screwing.  Ø 2.15 mm			
		Chape or <i>Gold cylinder</i>	OIC0025				
		Capuchon <i>Cap</i>	OIC0022				
		Pilier provisoire <i>Temporary cylinder</i>	OIC0023				




Serrage 15 N.cm - Tightening 15 N.cm

VIS BLACK TITE® DE FIXATION DE PROTHÈSE M1.4 M1.4 BLACK TITE® ABUTMENT FIXING SCREW



Destinée uniquement pour le vissage définitif. Utiliser la vis livrée avec l'analogue pour les vissages d'essayage.

Only intended for final screwing. Use the screw provided with the analogue for test screwing.

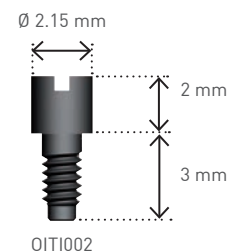


Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47

ATTACHEMENTS BOULE

BALL ATTACHMENTS

DALBO® SYSTEM

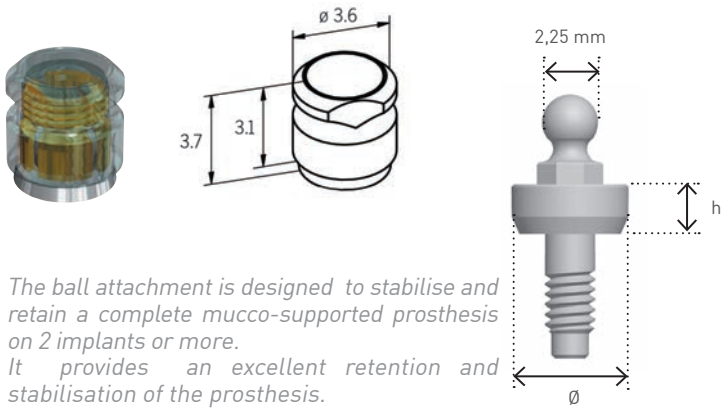

Le pilier boule est conçu pour la stabilisation des prothèses complètes mucco-supportées pour 2 implants ou plus. Il procure une excellente rétention et stabilisation de la prothèse.

The ball attachment is designed to stabilise and retain a complete mucco-supported prosthesis on 2 implants or more. It provides an excellent retention and stabilisation of the prosthesis.

ANTHOFIT® OI straight & tapered			
ATTACHEMENTS BOULE BALL ATTACHMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	h = 2.0 mm Ø 4.1 mm	OIDA001
		h = 4.0 mm Ø 4.1 mm	OIDA002
	 Ø 4.0 mm	h = 2.0 mm Ø 4.625 mm	OIDA003
		h = 4.0 mm Ø 4.625 mm	OIDA004
	 Ø 5.0 mm	h = 2.0 mm Ø 5.7 mm	OIDA006
		h = 4.0 mm Ø 5.7 mm	OIDA007

ANTHOFIT® HE straight			
ATTACHEMENTS BOULE BALL ATTACHMENTS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	DIMENSIONS SIZE	REFERENCES
	 Ø 4.1 mm	h = 2.0 mm Ø 4.625 mm	HEDA001
		h = 4.0 mm Ø 4.625 mm	HEDA002
	 Ø 5.0 mm	h = 2.0 mm Ø 5.7 mm	HEDA003
		h = 4.0 mm Ø 5.7 mm	HEDA004

 Serrage 35 N.cm - Tightening 35 N.cm

 Pièce livrée non stérile - Part supplied non sterile

 Présentation des clés de vissage p.47 - Description of screwing keys p.47

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS

ANTHOFIT® OI <i>straight & tapered</i>		
ANALOGUES BOULE BALL ANALOGS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	REFERENCES
	 Ø 3.5 mm	OIAN006
	 Ø 4.0 mm	OIAN007
	 Ø 5.0 mm	OIAN010

ANTHOFIT® HE <i>straight</i>		
ANALOGUES BOULE BALL ANALOGS	EMBASE PROTHÉTIQUE PROSTHETIC PLATFORM	REFERENCES
	 Ø 4.1 mm	HEAN003
	 Ø 5.0 mm	HEAN007

PARTIES FEMELLES COMMUNES OI & HE - OI & HE COMMON FEMALE PARTS

- PARTIE FEMELLE  SYSTÈME DALBO® Ref. OIDA005
FEMALE PART DALBO® SYSTEM
- TOURNEVIS ACTIVATEUR DE LA MATRICE DALBO  Ref. INDLB001
DALBO® HAND SCREW TIGHTENING SPRING

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

- TA6V
- Résilience modulable.
Adjustable resiliency.
- Compatible système Dalbo®.
Compatible with the Dalbo® System.
- Faible encombrement prothétique. Idéal pour les hauteurs inter-arcades limitées.
Reduced prosthetic inter-arch space. Ideal for limited inter archs heights.
- Divergences d'axes implantaïres maximum tolérées : 10°.
Maximum tolerated divergences of implant's axes : 10°.
- Partie femelle : le boîtier est fabriqué en titane, la pièce à lamelles rétentes est en Elitor (alliage précieux jaunes).
Female part : the box is made of Titanium and the retentive parts are made of Elitor (yellow precious metal alloy).

ANALOGUES DE MANIPULATION ET VIS DE LABORATOIRE

MANIPULATION ANALOGS AND LABORATORY SCREWS

- **ANALOGUE DE MANIPULATION COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME ANTHOFIT® HE.**
MANIPULATION ANALOG COMPATIBLE WITH THE ANTHOFIT® HE SYSTEM.

Ref. HEAN004



- **ANALOGUE DE MANIPULATION COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME ANTHOFIT® OI.**
MANIPULATION ANALOG COMPATIBLE WITH THE ANTHOFIT® OI SYSTEM.

Ref. OIAN008



- **VIS DE LABORATOIRE M1.4 COMPATIBLE AVEC LES ANALOGUES DE PILIERS CONIQUES DU SYSTÈME ANTHOFIT® HE & OI.**
LABORATORY M1.4 SCREWS COMPATIBLE WITH THE CONICAL PILLARS' ANALOGS OF THE ANTHOFIT® HE & OI SYSTEMS.

Ref. OIC0018



- **VIS DE LABORATOIRE M2 COMPATIBLE AVEC LES ANALOGUES D'IMPLANT DES SYSTÈMES ANTHOFIT® HE & OI.**
LABORATORY M2 SCREWS COMPATIBLE WITH THE IMPLANT'S ANALOGS OF THE ANTHOFIT® HE & OI SYSTEMS.

Ref. OICA005



- **SUPPORT MOIGNON ZIRCON**
ABUTMENT ZIRCON SUPPORT

Ref. OICE010



SERRAGE DES COMPOSANTS PROTHÉTIQUES

TIGHTENING OF PROSTHETIC COMPONENTS

TORQ CONTROL®

Ref.15501



→ ALTERNATIVE 1

TORQCONTROL® Réf. 15501 + mandrin de serrage Ref. IN MHELV.
TORQCONTROL® Ref. 15501 + tightening mandrel Ref. IN MHELV.



Ref. IN CCD

Ref. IN CHELV

→ ALTERNATIVE 2

Clé à cliquet dynamométrique Ref. IN CCD +
 clé de serrage Réf. IN CHELV
 Dynamometrical torq wrench Ref. IN CCD +
 tightening key Ref. IN CHELV








Présentation Torq Control® et Clé à cliquet dynamométrique p.49 - Torq Control® and Dynamometrical Torq Wrench presentation p.49

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS


SYNOPTIQUE COUPLES DE VISSAGE

PROSTHETIC TIGHTENING WRENCHES OVERVIEW

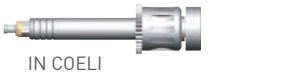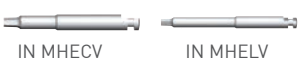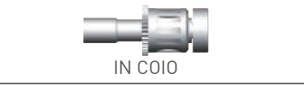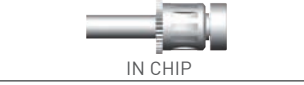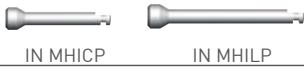CLÉS - WRENCHES	APPLICATIONS	SERRAGE - TIGHTENING
CLÉS ET MANDRINS PRÉHENSEURS - PREHENSILE WRENCHES AND MANDRELS		
 IN COERI IN COECI	Vissage des implants <i>Tightening of the implants</i>	Vissage manuel <i>Manual tightening</i>
 IN COELI IN MOERI		Vissage au contre-angle <i>Contra-angle based tightening</i>
 IN MOELI		
CLÉS DE VISSAGE PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC TIGHTENING WRENCHES		
 IN CHECV IN CHELV	Retrait du porte-implant ANTHOFIT® HE (clé longue uniquement). <i>Withdrawal of the ANTHOFIT® HE implant-holder (long wrench only).</i>	
	Mise en place de la vis de couverture & de la vis de cicatrisation. <i>Placing of the cover screw & the healing screw.</i>	
	Vissage des transferts d'empreinte. <i>Tightening of the impression transfers.</i>	15 N.cm
	Essayage et vissage des moignons Titane ou surcoulés. <i>Fitting and tightening of Titanium or over-castable abutments.</i>	Vissage manuel / 35 N.cm <i>Manual tightening / 35 N.cm</i>
 IN MHECV IN MHELV	Essayage et vissage des armatures sur piliers conique <i>Fitting and tightening of framework on conical abutments.</i>	15 N.cm
	Vissage définitif des moignons Titane ou surcoulés. <i>Final tightening of Titanium or over-castable abutments.</i>	35 N.cm
 IN COIO	Essayage et vissage des piliers O'ring. <i>Trial of O'ring abutments.</i>	Vissage manuel / 35 N.cm <i>Manual tightening / 35 N.cm</i>
	Vissage définitif des piliers O'ring. <i>Final tightening of O'ring abutments.</i>	35 N.cm
 IN MOICO IN MOILO		
 IN CHIP	Essayage et vissage des piliers coniques. <i>Trial tightening of conical abutments.</i>	Vissage manuel / 35 N.cm <i>Manual tightening / 35 N.cm</i>
 IN MHICP IN MHILP	Vissage définitif des piliers coniques. <i>Final tightening of conical abutments.</i>	35 N.cm

TROUSSE PROTHÉTIQUE

PROSTHETIC KIT

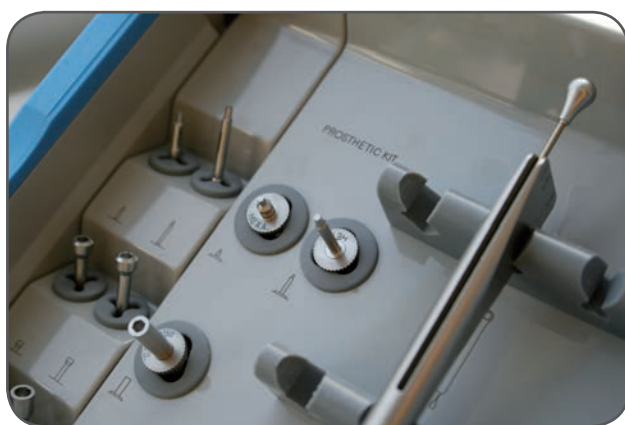

Ref. IN MOD PRH



REFERENCES	DESIGNATION	
Réf. IN MHECV	Mandrin de vissage hexagonal court - <i>Short hexagonal mandrel</i>	
Réf. IN MHELV	Mandrin de vissage hexagonal long - <i>Long hexagonal mandrel</i>	
Réf. IN MHICP	Mandrin de vissage pilier conique court - <i>Short mandrel for conical abutment</i>	
Réf. IN MHILP	Mandrin de vissage pilier conique long - <i>Long mandrel for conical abutment</i>	
Réf. IN MOICO	Mandrin de vissage attachement boule court - <i>Short mandrel for ball attachment</i>	
Réf. IN MOILO	Mandrin de vissage attachement boule long - <i>Long mandrel for ball attachment</i>	
Réf. IN CHECV	Clé de vissage hexagonal court - <i>Short hexagonal wrench</i>	
Réf. IN CHELV	Clé de vissage hexagonal long - <i>Long hexagonal wrench</i>	
Réf. IN CHIP	Clé de vissage pilier conique - <i>Conical abutment's wrench</i>	
Réf. IN COIO	Clé de vissage attachement boule - <i>Ball attachment's wrench</i>	
Réf. INDLB001	Tournevis activateur Dalbo® - <i>Dalbo® hand screw tightening spring</i>	
Réf. IN CCD	Clé à cliquet dynamométrique - <i>Dynamometrical torq wrench</i>	

Boîtier PRH vide - *PRH empty box* Ref. IN MOD PRHV

3. COMPOSANTS DE RESTAURATION PROTHÉTIQUE - PROSTHETIC RESTORATION COMPONENTS

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

TORQUE WRENCH

TORQ CONTROL®



Réglage du couple
Adjusting the torque

Vissage
Screwing

Bouton Poussoir
Push Button

- Extrême précision du serrage des éléments prothétiques grâce au contrôle de couple et au débrayage de la clé.
Precise tightening thanks to the torque control and automatic declutching system.
- 7 niveaux de couple de 10 à 35 N.cm.
7 torq levels from 10 to 35 N.cm.
- Accès en bouche facilité par la micro-tête et l'angulation 100° (secteurs postérieurs).
Easy access in mouth thanks to the 100° angulated micro-head (posterior areas).
- Excellente manipulation et préhension grâce au design et la légèreté de l'instrument.
Its design and lightness get a greater facility of use.
- Convient pour tous les mandrins standards (Ø 2,35 mm).
Compatible with any standard chucks (Ø 2,35 mm).

Couple de débrayage Torque declutching	10 N.cm	15 N.cm	20 N.cm	25 N.cm	30 N.cm	32 N.cm	35 N.cm
Ref. 15501	•	•	•	•	•	•	•

Pour mandrins de C.A. standards Ø 2.35 - For mandrels of standard C.A. Ø 2.35.

Accessoires p.66 - Accessories p.66

CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE

DYNAMOMETRICAL TORQ WRENCH



Réf. IN CCD




Précis et simple d'utilisation !
Precise and user friendly !

- Clé de calibrage spécifique aux systèmes implantaires Anthogyr.
Genuine Anthogyr implant systems Gauge wrench.
- Simplicité d'utilisation avec 3 couples à 15, 25 et 35 N.cm pour le serrage de tous les composants prothétiques.
3 tightening torques (15, 25 and 35 N.cm) suitable for prosthetic parts.
- Clé avec indicateur de couple.
User-friendly torque indicator.
- Précision et durabilité garanties par le choix d'un matériau adapté.
Precision and durability thanks to reliable material.
- Clé entièrement démontable pour une parfaite nettoyabilité.
Easy to dismantled for maintenance.

NOUVEL ANCILLAIRE CHIRURGICAL FORETS ULTRA-PERFORMANTS


NEW SURGICAL KIT, ULTRA PERFORMANCE DRILL BITS

- SÉCURITÉ ET PRÉCISION
SAFETY AND ACCURACY
- POINTE À GÉOMÉTRIE VARIABLE EN FONCTION DES DIAMÈTRES
VARIABLE GEOMETRY TIP DEPENDING ON DIAMETERS
- UN ÉQUILIBRE INCOMPARABLE ENTRE ATTAQUE DU FORET, MAÎTRISE DE COUPE ET DURABILITÉ
A PERFECT BALANCE OF THE CUTTING, THE STABILITY AND THE DURABILITY OF THE DRILLS

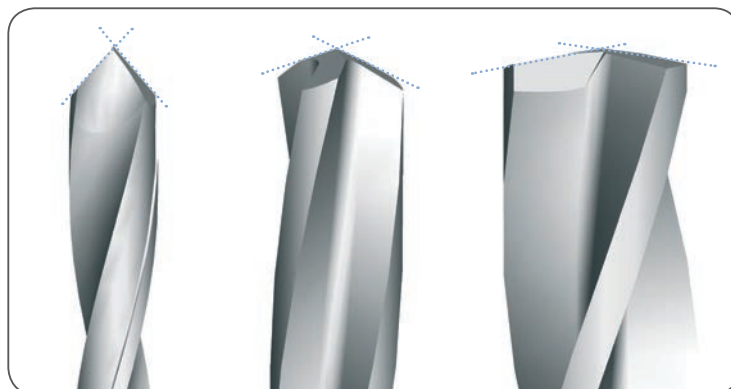


ANGLE DE POINTE - POINT ANGLE

4. ANCILLAIRE CHIRURGICAL - SURGICAL KIT

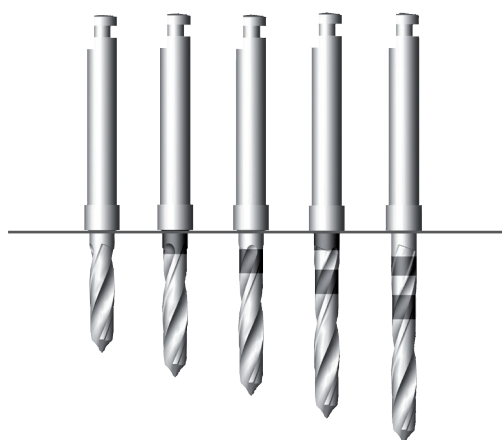


FORETS INITIAUX À BUTÉE Ø 2 mm
INITIAL DRILLS WITH A STOP SYSTEM Ø 2 mm

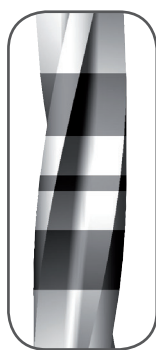

Bee·color®

MARQUAGE Bee·color®
Bee·color® MARKING

Laissez-vous surprendre ...
Simply surprising ...

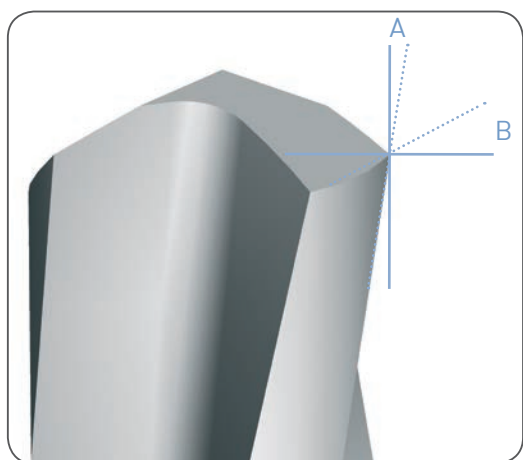


ANGLE D'ATTAQUE (A)
BORING ANGLE (A)

ANGLE DE DÉPOUILLE (B)
HIDE ANGLE (B)



CODE COULEUR - COLOR CODE

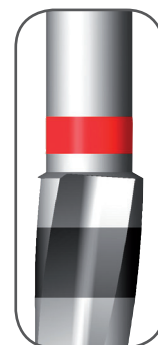

TROUSSES ANTHOFIT®

ANTHOFIT® SURGICAL KITS

HE
STRAIGHT



KIT COMPLET
COMPLETE KIT

Ref. IN KIT HES



MODULE BASE - RÉF. IN MOD BA
BASIC KIT - Ref. IN MOD BA



MODULE HES - RÉF. IN MOD HES
HES SPECIFIC KIT - Ref. IN MOD HES

OI
STRAIGHT



KIT COMPLET
COMPLETE KIT

Ref. IN KIT OIS



MODULE BASE - RÉF. IN MOD BA
BASIC KIT - Ref. IN MOD BA



MODULE OIS - RÉF. IN MOD OIS
OIS SPECIFIC KIT - Ref. IN MOD OIS

OI
TAPERED



KIT COMPLET
COMPLETE KIT

Ref. IN KIT OIT



MODULE BASE - RÉF. IN MOD BA
BASIC KIT - Ref. IN MOD BA



MODULE OIT - RÉF. IN MOD OIT
OIT SPECIFIC KIT - Ref. IN MOD OIT

4. ANCILLAIRE CHIRURGICAL - *SURGICAL KIT*

MODULE DE BASE ANTHOFIT®

ANTHOFIT® BASIC KIT



Ref. IN MOD BA



REFERENCES	DESIGNATION	
Réf. IN FB 20	Fraise boule - Round bur	
Réf. INFH20080	Foret Ø 2.0 mm x 8 mm - Drill Ø 2.0 mm x 8 mm	
Réf. INFH20100	Foret Ø 2.0 mm x 10 mm - Drill Ø 2.0 mm x 10 mm	
Réf. INFH20115	Foret Ø 2.0 mm x 11.5 mm - Drill Ø 2.0 mm x 11.5 mm	
Réf. INFH20130	Foret Ø 2.0 mm x 13 mm - Drill Ø 2.0 mm x 13 mm	
Réf. INFH20150	Foret Ø 2.0 mm x 15 mm - Drill Ø 2.0 mm x 15 mm	
Réf. IN COELI	Clé de préhension longue - Long octagonal wrench	
Réf. IN COECI	Clé de préhension standard - Standard octagonal wrench	
Réf. IN COERI	Clé de préhension courte - Short octagonal wrench	
Réf. IN MOELI	Mandrin de préhension long - Long octagonal mandrel	
Réf. IN MOECI	Mandrin de préhension standard - Standard octagonal mandrel	
Réf. IN MOERI	Mandrin de préhension court - Short octagonal mandrel	
Réf. IN CHELV	Clé de vissage longue - Long hexagonal wrench	
Réf. IN JPA	Paralléliseurs x4 - Paralleling pins x4	
Réf. IN GPPA	Guide de perçage - Drill guide	
Réf. IN EXM	Rallonge de mandrin - Mandrel extension	
Réf. IN CPM	Clé mandrin - Mandrel wrench	
Réf. IN CC	Clé à cliquet - Ratchet wrench	
Réf. IN JPFG	Jauge coudée - Graduated depth	

Boîtier Base vide - Base empty box Ref. IN MOD BAV

MODULE ANTHOFIT® HE STRAIGHT

ANTHOFIT® HE STRAIGHT SPECIFIC KIT



Ref. IN MOD HES



	REFERENCES	DESIGNATION	
	Réf. INFA30120	Foret hélicoïdal Ø 3.0 mm x 12 mm C - <i>Twist drill Ø 3.0 mm x 12 mm C</i>	
	Réf. INFA30200	Foret hélicoïdal Ø 3.0 mm x 20 mm L - <i>Twist drill Ø 3.0 mm x 20 mm L</i>	
	Réf. INFEHE4130	Fraise à évaser HE Ø 3.5 mm - <i>Countersink HE Ø 3.5 mm</i>	
	Réf. INTA35150	Taraud Ø 3.5 mm x 15 mm - <i>Tap Ø 3.5 mm</i>	
	Réf. INFA32120	Foret hélicoïdal Ø 3.25 mm x 12 mm C - <i>Twist drill Ø 3.25 mm x 12 mm C</i>	
	Réf. INFA32200	Foret hélicoïdal Ø 3.25 mm x 20 mm L - <i>Twist drill Ø 3.25 mm x 20 mm L</i>	
	Réf. INFEHE4132	Fraise à évaser HE Ø 3.75 mm - <i>Countersink HE Ø 3.75 mm</i>	
	Réf. INTA37150	Taraud Ø 3.75 mm x 15 mm - <i>Tap Ø 3.75 mm</i>	
	Réf. INFA35120	Foret hélicoïdal Ø 3.5 mm x 12 mm C - <i>Twist drill Ø 3.5 mm x 12 mm C</i>	
	Réf. INFA35200	Foret hélicoïdal Ø 3.25 mm x 20 mm L - <i>Twist drill Ø 3.5 mm x 20 mm L</i>	
	Réf. INFEHE4135	Fraise à évaser HE Ø 4.0 mm - <i>Countersink HE Ø 4.0 mm</i>	
	Réf. INTA40150	Taraud Ø 4.0 mm x 15 mm - <i>Tap Ø 4.0 mm</i>	
	Réf. INFA40120	Foret hélicoïdal Ø 4.0 mm x 12 mm C - <i>Twist drill Ø 4.0 mm x 12 mm C</i>	
	Réf. INFA40200	Foret hélicoïdal Ø 4.0 mm x 20 mm L - <i>Twist drill Ø 4.0 mm x 20 mm L</i>	
	Réf. INFA45120	Foret hélicoïdal Ø 4.5 mm x 12 mm C - <i>Twist drill Ø 4.5 mm x 12 mm C</i>	
	Réf. INFA45200	Foret hélicoïdal Ø 4.5 mm x 20 mm L - <i>Twist drill Ø 4.5 mm x 20 mm L</i>	
	Réf. INFEHE5040	Fraise à évaser HE Ø 5.0 mm - <i>Countersink HE Ø 5.0 mm</i>	
	Réf. INTA50130	Taraud Ø 5.0 mm x 13 mm - <i>Tap Ø 5.0 mm</i>	

Boîtier HE straight vide - *HE straight empty box* Ref. IN MOD HESV

4. ANCILLAIRE CHIRURGICAL - SURGICAL KIT

MODULE ANTHOFIT® OI STRAIGHT

ANTHOFIT® OI STRAIGHT SPECIFIC KIT



Ref. IN MOD OIS



	REFERENCES	DESIGNATION	
	Réf. INFA30120	Foret hélicoïdal Ø 3.0 mm x 12 mm C - Twist drill Ø 3.0 mm x 12 mm C	
	Réf. INFA30200	Foret hélicoïdal Ø 3.0 mm x 20 mm L - Twist drill Ø 3.0 mm x 20 mm L	
	Réf. INFE013530	Fraise à évaser OI Ø 3.5 mm - Countersink OI Ø 3.5 mm	
	Réf. INTA35150	Taraud Ø 3.5 mm x 15 mm - Tap Ø 3.5 mm	
	Réf. INFA35120	Foret hélicoïdal Ø 3.5 mm x 12 mm C - Twist drill Ø 3.5 mm x 12 mm C	
	Réf. INFA35200	Foret hélicoïdal Ø 3.5 mm x 20 mm L - Twist drill Ø 3.5 mm x 20 mm L	
	Réf. INFE014035	Fraise à évaser OI Ø 4.0 mm - Countersink OI Ø 4.0 mm	
	Réf. INTA40150	Taraud Ø 4.0 mm x 15 mm - Tap Ø 4.0 mm	
	Réf. INFA40120	Foret hélicoïdal Ø 4.0 mm x 12 mm C - Twist drill Ø 4.0 mm x 12 mm C	
	Réf. INFA40200	Foret hélicoïdal Ø 4.0 mm x 20 mm L - Twist drill Ø 4.0 mm x 20 mm L	
	Réf. INFA45120	Foret hélicoïdal Ø 4.5 mm x 12 mm C - Twist drill Ø 4.5 mm x 12 mm C	
	Réf. INFA45200	Foret hélicoïdal Ø 4.5 mm x 20 mm L - Twist drill Ø 4.5 mm x 20 mm L	
	Réf. INFE015040	Fraise à évaser OI Ø 5.0 mm - Countersink OI Ø 5.0 mm	
	Réf. INTA50130	Taraud Ø 5.0 mm x 13 mm - Tap Ø 5.0 mm	

Boîtier OI straight vide - OI straight empty box Ref. IN MOD OISV

MODULE ANTHOFIT® OI TAPERED

ANTHOFIT® OI TAPERED SPECIFIC KIT



Ref. IN MOD OIT

	REFERENCES	DESIGNATION	
	Réf. INFC35080	Foret conique Ø 3.5 mm x 8 mm - Conical drill Ø 3.5 mm x 8 mm	
	Réf. INFC35100	Foret conique Ø 3.5 mm x 10 mm - Conical drill Ø 3.5 mm x 10 mm	
	Réf. INFC35115	Foret conique Ø 3.5 mm x 11.5 mm - Conical drill Ø 3.5 mm x 11.5 mm	
	Réf. INFC35130	Foret conique Ø 3.5 mm x 13 mm - Conical drill Ø 3.5 mm x 13 mm	
	Réf. INFC35150	Foret conique Ø 3.5 mm x 15 mm - Conical drill Ø 3.5 mm x 15 mm	
	Réf. INTC35	Taraut conique Ø 3.5 mm - Tap Ø 3.5 mm	
	Réf. INFC40080	Foret conique Ø 4.0 mm x 8 mm - Conical drill Ø 4.0 mm x 8 mm	
	Réf. INFC40100	Foret conique Ø 4.0 mm x 10 mm - Conical drill Ø 4.0 mm x 10 mm	
	Réf. INFC40115	Foret conique Ø 4.0 mm x 11.5 mm - Conical drill Ø 4.0 mm x 11.5 mm	
	Réf. INFC40130	Foret conique Ø 4.0 mm x 13 mm - Conical drill Ø 4.0 mm x 13 mm	
	Réf. INFC40150	Foret conique Ø 4.0 mm x 15 mm - Conical drill Ø 4.0 mm x 15 mm	
	Réf. INTC40	Taraut conique Ø 4.0 mm - Tap Ø 4.0 mm	
	Réf. INFC50080	Foret conique Ø 5.0 mm x 8 mm - Conical drill Ø 5.0 mm x 8 mm	
	Réf. INFC50100	Foret conique Ø 5.0 mm x 10 mm - Conical drill Ø 5.0 mm x 10 mm	
	Réf. INFC50115	Foret conique Ø 5.0 mm x 11.5 mm - Conical drill Ø 5.0 mm x 11.5 mm	
	Réf. INFC50130	Foret conique Ø 5.0 mm x 13 mm - Conical drill Ø 5.0 mm x 13 mm	
	Réf. INTC50	Taraut conique Ø 5.0 mm - Tap Ø 5.0 mm	

Boîtier OI tapered vide - OI tapered empty box Ref. IN MOD OITV

Ossfit®

One Surgical Step




Possibilité d'évolution vers le système Ossfit®
Possibility to evolve towards the Ossfit® system

- FORETS ULTRA PERFORMANTS à géométrie de coupe variable
HIGH PERFORMANCE DRILLS variable geometry tip depending on diameters
- Marquage laser **Bee·color®**
Bee·color® laser marking
- Forets initiaux à butée Ø 2 mm
Ø 2 mm initial drills with a stop system
- Trousse designée, ergonomique et modulable
Design, ergonomic and versatile


CONTRE-ANGLES
D'IMPLANTOLOGIE
MONT BLANC®

MONT BLANC®
*CONTRA-ANGLES
FOR IMPLANTOLOGY*

Contre-angle **MONT BLANC®**
MONT BLANC® contra-angle

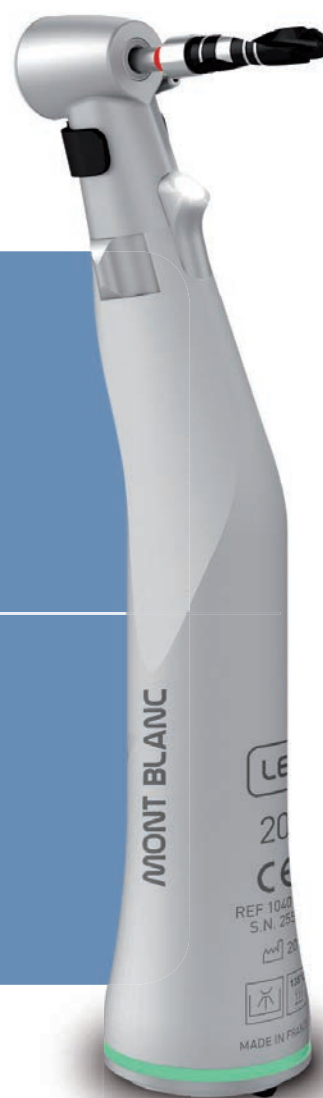

5. INSTRUMENTATION PÉRIPHÉRIQUE - PERIPHERICAL INSTRUMENTS

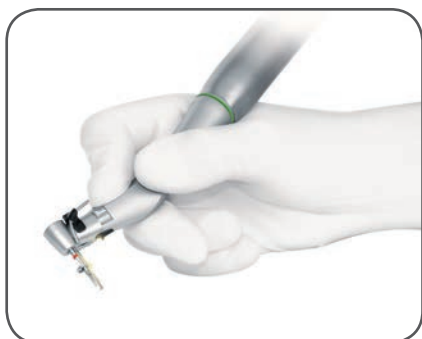

→ **ERGONOMIE OPTIMALE**
OPTIMUM ERGONOMICS

→ **DÉMONTABILITÉ EN UN GESTE**
CAN BE INSTANTLY DISMANTLED

→ **TENUE DE COUPLE EXCEPTIONNELLE : 80 N.CM**
EXCEPTIONAL TORQUE : UP TO 80 N.CM



→ **SÉCURITÉ OPTIMALE : CONTRÔLE DE PROFONDEUR PAR BUTÉE**
*OPTIMUM SECURITY : ADJUSTMENT OF THE DRILLING DEPTH
THANKS TO A STOP SYSTEM*

→ **i·coat®**
REVÊTEMENT **i·coat®**
i·coat® COATING

→ **ENTRETIEN IRRÉPROCHABLE**  

→ **CAVALIER DE PULVÉRISATION A USAGE UNIQUE**
SINGLE USE SPRAYING NOZZLE

→ **ÉCLAIRAGE LED TECHNOLOGY**
LED TECHNOLOGY LIGHTING

NEW !



CONTRE-ANGLES **MONT BLANC®**

MONT BLANC® CONTRA-ANGLES



Ref. 10400XLED

Ref. 10401XLED

La gamme de contre-angles **MONT BLANC®** pour l'implantologie fait partie de la toute dernière génération des contre-angles High-Tech présents sur le marché.

Les contre-angles **MONT BLANC®** d'implantologie présentent une tenue de couple exceptionnelle jusqu'à 80 N.cm pour réaliser tous vos actes de chirurgie sans échauffements.

Associé à la lumière, le contre-angle **MONT BLANC®** d'implantologie vous offre la possibilité de travailler avec une précision optimale.

Le traitement de surface **iCoat®** vous procure un confort d'utilisation idéal.

*The **MONT BLANC®** contra-angles for implantology are one of the very latest waves of hi-tech contra-angle handpieces to arrive on the market.*

*The **MONT BLANC®** Implantology contra-angle delivers an exceptional torque of up to 80 N.cm and makes possible to complete any surgical acts without overheating.*

*Providing light, the **MONT BLANC®** Implantology contra-angle allows high-precision work.*

*The **iCoat®** surface treatment delivers an optimal tactile sensation.*



LED TECHNOLOGY - LED TECHNOLOGY

NEW !

- Éclairage de qualité «lumière du jour» procurant un rendu réaliste et incomparable des couleurs.
«Day light» quality lighting provides optimal visibility with exceptionally true color.
- Zone éclairée élargie pour un meilleur confort de travail.
Larger volume of lighting for more comfortable working space.
- Puissance 31 000 Lux.
Power 31 000 Lux.
- Durabilité sans égal.
Unrivalled LED durability.



ÉLÉGANCE ET ERGONOMIE ELEGANCE AND ERGONOMICS

- Design profilé et ligne séduisante.
Streamlined and aesthetically pleasing design.
- Angulation parfaite facilitant l'accès au site osseux.
Perfect angulation improving access to bone area.
- Prise en main optimale évitant toutes crispations et sensations de fatigue.
Optimal handgrip avoiding clenching or tiredness.
- Facilite la perception de l'axe de forage.
Easy view of the drilling axis.

TENUE DE COUPLE EXCEPTIONNELLE EXCEPTIONAL TORQUE

- Résistance au couple de 80 N.cm permettant de réaliser toutes vos séquences implantaire quelle que soit la densité osseuse.
Torque of up to 80 N.cm making possible to complete any implant sequences, whatever the bone density is.
- Roulements et engrenages renforcés.
Reinforced bearings and gearing system.
- Fiabilité totale !
Total reliability !

CAVALIER DE PULVÉRISATION À USAGE UNIQUE SINGLE USE SPRAYING NOZZLE

- Hygiène irréprochable : cavalier à usage unique livré stérile.
Perfect hygiene : single use spraying nozzle supplied sterile.
- Gain de temps : aucun entretien nécessaire.
Time-saving : maintenance free.
- Simple d'utilisation : cavalier à irrigation externe aisément mis en place par un simple clip.
Easy-to-use : spraying nozzle with external spray and a simple clip set-up.

5. INSTRUMENTATION PÉRIPHÉRIQUE - PERIPHERICAL INSTRUMENTS

DÉMONTABILITÉ EN UN GESTE FAST DISMANTLING DEVICE

- Tête entièrement démontable pour une meilleure décontamination.
Fully removable head for optimal decontamination.
- Entretien efficace en profondeur.
Regular in-depth maintenance.
- Longévité de l'instrument.
Long life span.



BUTÉE RÉGLABLE : MONT BLANC® Control ADJUSTABLE STOP : MONT BLANC® Control

- Sécurité optimale.
Total safety.
- Facilité d'utilisation : une seule butée réglable nécessaire pour toute longueur d'implant.
Easy to use : one single adjustable stop is necessary for any implant, whatever its length.
- Précision idéale : un système de butée qui vous permet de déterminer facilement la profondeur souhaitée.
High precision : the adjustable stop system determines the required depth.
- Encombrement minimal pour un meilleur accès en bouche et une visibilité parfaite.
Minimized size for easier access and maximum visibility.
- Chaque contre-angle est livré avec un régleur.
Every contra-angle is supplied with a ruler.



Butée réglable
Adjustable stop

FIABILITÉ - RELIABLE



- Robustesse des matériaux inox contribuant à la longévité du contre-angle.
Sturdiness of the stainless steel material resulting in increased durability.
- Thermodésinfection et stérilisation.
Thermal disinfection and sterilization.

REVÊTEMENT : coat® - coat® COATING

- Grip de rugosité parfaitement adapté aux actes longs.
Ideal roughness grip adapted to long surgical acts.
- Confort d'utilisation optimal.
User-friendly.
- Diminue les sensations de crispations et de fatigue de la main.
Avoids hand clenching or tiredness.
- Protection et durabilité des surfaces.
Protective and long-lasting surfaces.



bouchons de protection pour fibre optique
- protection cap for the fiber optic
aiguille pour irrigation interne à l'outil
- needle for internal spray
cavalier de pulvérisation stérilisable
- spraying nozzle
cavalier à usage unique x3
- single use spraying nozzle
raccord inox en «Y»
- «Y» shaped stainless steel
régleur - ruler

20:1 : fraise CA Ø 2.35

*Compatible uniquement avec le moteur de chirurgie et d'implantologie IMPLANTEO®. - Only compatible with the IMPLANTEO® implantology and surgery motor.

** Compatible avec les moteurs de chirurgie et d'implantologie lumière - Compatible with implantology and surgery motor with light.

20:1 Ref. 10400XLED* •

Ref. 10400XL** • • • • • • •

Ref. 10400X • • • • •

20:1 Ref. 10401XLED* •

Ref. 10401XL** • • • • • • •

Ref. 10401X • • • • •



Accessoires p.66 - Accessories p.66

MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE **iMPLANTEO**®

iMPLANTEO® MOTOR FOR IMPLANTOLOGY

Compact et ergonomique, il s'annonce comme le partenaire idéal des chirurgies implantaire. La simplicité d'utilisation et sa convivialité sont ses premiers atouts; le large écran tactile couleur offre au praticien **un confort de travail précieux**.

Les données importantes en chirurgie, vitesse et couple employé (N.cm) peuvent être suivies en temps réel pendant l'intervention et sauvegardées sur une clé USB pour une meilleure traçabilité du dossier patient. Puissant et pratique, il répond parfaitement aux dernières normes en vigueur pour l'entretien et la stérilisation.

La lumière LED confère enfin le confort visuel en chirurgie que tous les praticiens attendent.

*Simple and powerful, the new **iMPLANTEO**® motor is a necessary partner for all your surgical procedures. The large color touch screen display is simple to navigate and will make everyday procedures more comfortable.*

During the surgery, the critical data (speed, torque in N.cm,) is constantly displayed in real-time and can be saved on a USB key and tracked in the patient records. It is a powerful and practical motor that conforms to the highest maintenance and sterilization standards.

The LED technology provides the optimal light for visibility that any dental practitioner will appreciate.

NEW !



MONT BLANC®



ECLAIRAGE LED TECHNOLOGY **LED TECHNOLOGY LIGHTING :**

- **Confort de travail optimal :**
éclairage identique à la lumière du jour (6 500°K).
Optimum visibility:
Natural light quality equivalent (6,500°K).
- **Champ d'illumination plus large**
qu'un éclairage classique.
Illumination field wider than classical lighting.
- **Résistance et durabilité** du composant LED.
Resistance and durability of the LED component.
- **Puissance réglable** - 31 000 LUX.
Adjustable power - up to 31,000 LUX.



Ref. 10400XLED

Ref. 10401XLED

5. INSTRUMENTATION PÉRIPHÉRIQUE - PERIPHERICAL INSTRUMENTS

PUISSANCE ET PRÉCISION POWER AND PRECISION

- Couple moteur élevé.
High torque output.
- Plage de vitesse et couple plus large.
Greater speed control.
- Fonction CAC - Contra-Angle Calibration - intégrée : la puissance du moteur est adaptée au rendement de votre contre-angle.
Contra-Angle Calibration - the precision of the motor is adapted to the contra-angle used.



PERFORMANCE ET INTELLIGENCE CHIRURGICALE INTELLIGENCE

- Informations en valeur réelle couple (N.cm) & vitesse (tr.min).
Live readout of important data (torque in N/cm, speed).
- Affichage graphique en temps réel.
Real-time graphics display of critical data.
- **Traçabilité patient assurée :**
sauvegarde des données sur clé USB.
Patient record tracking : data saving on USB memory key.
- **10 programmes paramétrables** et jusqu'à **10 séquences par programme.**
10 easily configurable programs and up to 10 sequences per program.

GRAND ÉCRAN COULEUR TACTILE POUR UN CONFORT DE TRAVAIL UNIQUE LARGE, COLOR TOUCH SCREEN ALLOWING FOR EASY VIEWING OF CRITICAL DATA

- **Navigation intuitive** par langage pictogrammes.
Intuitive navigation system with descriptive icons.
- **Visibilité optimale** avec son écran 5.7 pouces.
High visibility thanks to the 5.7 inch screen.
- **Grand nombre d'applications utiles pour une navigation facile**
High number of useful applications for easy navigation!

COMPOSITION DES KITS

	kit MONT BLANC [®] LED	kit MONT BLANC [®]	support moteur - motor holder	mandrin de calibrage - mandrel for calibrating	bouchon de stérilisation - protection cap	lot de 10 clips pour lignes - pack of 10 attachment clips for irrigation lines	1 kit stérile (1 gaine moteur + 1 sticker écran) 1 sterile kit (1 micromotor protective sleeve + 1 screen protective film)	Clé USB - USB key	ligne d'irrigation pour poche et bouteille 1 irrigation line for bag of liquid and bottle
Ref. 11501 LED	10400XLED		•	•	•	•	•	•	•
Ref. 11502 LED	10401XLED		•	•	•	•	•	•	•
Ref. 11501	Ref. 10400X		•	•	•	•	•	•	•
Ref. 11502	Ref. 10401X		•	•	•	•	•	•	•
Ref. 11503			•	•	•	•	•	•	•
Ref. 11504			•	•	•	•	•	•	•
Ref. 11505			•	•	•	•	•	•	•

COLLECTEUR D'OS ASPEO®

BONE COLLECTOR ASPEO®





Ref. 12010

Le collecteur d'os **ASPEO®** se connecte sur l'aspiration du fauteuil et permet de récolter des fragments osseux au moment de la préparation du site.

La grande capacité de son filtre se traduit par des carottes osseuses importantes et de très bonne qualité. L'os récupéré pourra être apposé très facilement grâce à la forme ergonomique de la seringue, pour les applications telles que la correction d'un défaut osseux, un recouvrement d'une spire apparente de l'implant ou encore un comblement osseux en zone maxillaire supérieure.

ASPEO® bone collector is to be attached on the dental chair's suction system and allows the harvesting of bone fragments during implant site preparation.

The large capacity of its filter translates into extensive and high-quality volumes of bone. Thanks to the ergonomic of the syringe, the bone will be easily set into place, for applications such as : correction of a bone defect, covering an apparent implant's thread, a filling in superior maxillary area.

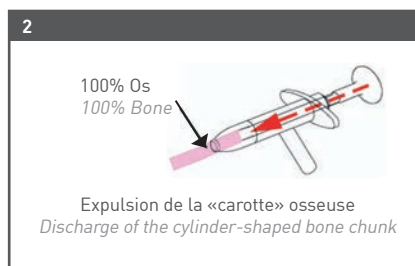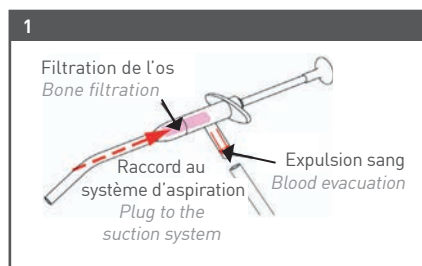

EFFICACITÉ - EFFICIENCY

- Grande capacité de récupération d'os.
Extensive volumes of bone.
- Os endogène filtré de très bonne qualité.
High-quality endogenous filtered bone.

ERGONOMIQUE - ERGONOMICS

- Instrument extrêmement maniable connecté à l'aspiration.
Very practical instrument attached on the suction system.
- Excellente visibilité en bouche.
Excellent visibility in mouth.

ÉCONOMIQUE - ECONOMICAL

- Filtre à usage unique qui doit être remplacé à chaque patient.
Single-use filter. The filter has to be changed after each patient.
- Utilisable à plusieurs reprises pour un même patient.
The filter can be used several times for the same patient.

ENTRETIEN IRRÉPROCHABLE IMPECCABLE MAINTENANCE



- Conception tout inox.
100% stainless steel.
- Entièrement démontable.
Totally dismountable.
- Filtre de récupération à usage unique.
Single-use filter.
- Immergeable dans la soude.
Can be immersed in strong solutions like soda.
- Thermodésinfection et stérilisation.
Thermal disinfection and sterilization.

Ref. 12010 Collecteur d'os + 3 filtres + adaptateur pour connexion
Bone collector + 3 filters + adaptor for connexion

5. INSTRUMENTATION PÉRIPHÉRIQUE - PERIPHERICAL INSTRUMENTS


VIS D'OSTÉOSYNTHÈSE

OSTEOSYNTHESIS SCREW

L'obtention de résultats esthétiques en chirurgie implantaire nécessite souvent un remodelage osseux réussi. La vis d'ostéosynthèse Anthogyr a été spécialement conçue pour la pose de greffons osseux aussi bien sur le maxillaire qu'à la mandibule. Ses caractéristiques originales en font un outil de travail indispensable et facile d'utilisation pour tout chirurgien dentiste aguerri en greffe d'apposition ou désireux de maîtriser cette technique.

Getting aesthetic results in implantology often requires successful bone remodelling. The Anthogyr osteosynthesis screw is designed for a fast and easy bone grafting on the upper as well as on the lower jaw.

Its special design makes it an essential tool for any surgeon already keen on bone grafting or willing to improve its use of it.

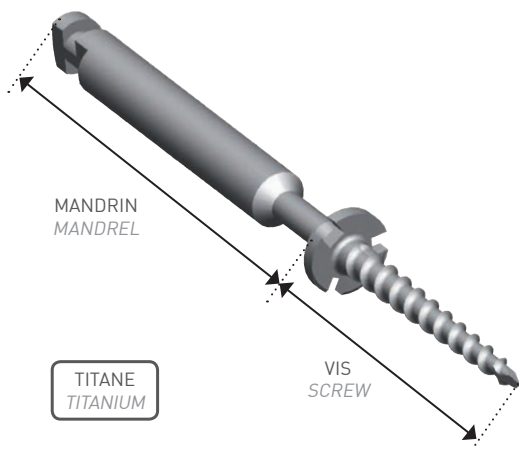

	lg 8 mm	lg 10 mm	lg 12 mm	lg 14 mm
Ref. CO GREF08	•			
Ref. CO GREF10		•		
Ref. CO GREF12			•	
Ref. CO GREF14				•

Les vis de greffon sont livrées par 2 dans un double emballage stérile.

The osteosynthesis screws are supplied by pair in a double sterile packaging.

- Auto-forante.
Self-drilling screw.
- Auto-sécable.
Snap-off system.
- Adaptable sur contre-angle.
Suitable for contra-angle.



TROUSSE
KIT

ACCESSOIRES - ACCESSORIES		REFERENCES
	Foret Ø 1.5 mm x 10 mm Drill Ø 1.5 mm x 10 mm	INFH15100
	Mandrin long - Long mandrel Mandrin court - Short mandrel	INGF001 INGF002
	Clé de vissage - Wrench	INGF003
	Clé à cliquet - Ratchet wrench	IN CC
	Tourne-vis - Screwdriver	INGF004
	Clé contre-couple - Holding key	INGF005
	Trousse - Kit Comprenant : 1 foret Ø 1.5 mm + 1 mandrin court + 1 tourne-vis + 1 clé contre-couple Including : 1 drill Ø 1.5 mm + 1 short mandrel + 1 screwdriver + 1 holding key	INKTGF

ACCESSOIRES POUR MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE

Ref. 11052 5	Lot de 5 lignes d'irrigation pour poche et bouteille <i>Pack of 5 tubings for bag of bottle</i>	
Ref. 11052 10	Lot de 10 lignes d'irrigation pour poche et bouteille <i>Pack of 10 tubings for bag of bottle</i>	
Ref. 11790	Lot de 10 clips pour lignes <i>Pack of 10 clips for tubing</i>	
Ref. 6841-0,5L	Poche 0,5l NaCl 0,9% <i>Bag NaCl 0,9 % / 0,5 L</i>	
Ref. 6841-0,5L V	Lot de 20 Poches 0,5l NaCl 0,9% <i>Pack of 20 bags NaCl 0,9 % / 0,5 L</i>	
Ref. 6841A	Poche 1l NaCl <i>Bag NaCl / 1L</i>	
Ref. 6841A D	Lot de 12 Poches 1l NaCl <i>Pack of 12 bags / 1 L</i>	
Ref. 11053 5	Lot de 5 champs transparents adhésifs <i>Pack of 5 screen protective films</i>	-
Ref. 11053 10	Lot de 10 champs transparents adhésifs <i>Pack of 10 screen protective films</i>	-
Ref. 11054 5	Lot de 5 gaines de protection moteur <i>Pack of 5 motor sheaths</i>	-
Ref. 11054 10	Lot de 10 gaines de protection moteur <i>Pack of 10 motor sheaths</i>	-
Ref. 11555	Support moteur <i>Motor holder</i>	
Ref. 11410 *	Mandrin de calibrage (pour connexion du contre-angle au module) <i>Mandrel for calibration module (for contra-angle connection)</i>	
Ref. 11565	Potence <i>Bracket</i>	
Ref. 11660	Module de calibrage <i>Calibration module</i>	
Ref. 11580	Clé USB <i>USB key</i>	-
Ref. 11700	Pédale <i>Pedal</i>	-
Ref. 11750 M	Micro-moteur <i>Micromotor</i>	
Ref. 11750 MLED	Micro-moteur pour contre-angle  <i>Micromotor for  contra-angle</i>	
Ref. 11795 *	Bouchon de stérilisation (pour nez moteur) <i>Micromotor sterilization cap</i>	

ACCESSOIRES POUR COLLECTEUR D'OS

Ref. 12006	Lot de 6 filtres à usage unique <i>Pack of 6 single use filters</i>	
Ref. 12012	Lot de 12 filtres à usage unique <i>Pack of 12 single use filters</i>	
Ref. 12041	Adaptateur pour connexion au système d'aspiration <i>Adaptator for plugging to the suction system</i>	

5. INSTRUMENTATION PÉRIPHÉRIQUE - PERIPHERICAL INSTRUMENTS

ACCESSOIRES POUR CONTRE-ANGLES D'IMPLANTOLOGIE

Ref. 10420	Raccord inox en «Y» (livré avec 2 tubes silicone) «Y» shaped stainless steel sterilisable coupling (delivered with two silicon tubes)	
Ref. 10430	Aiguille pour spray interne (livré avec un tube silicone) Needle for internal spray (delivered with one silicon tube)	
Ref. 10470X	Tête MONT BLANC Implantology® et engrenage MONT BLANC Implantology® head and gears	
Ref. 10410XLED	Tête MONT BLANC Control® LED (avec butée + support butée) MONT BLANC Control® LED head (with depth stop + depth stop holder)	
Ref. 10410X	Tête MONT BLANC Control® (avec butée + support butée) MONT BLANC Control® head (with depth stop + depth stop holder)	
Ref. 10410XL	Tête MONT BLANC Control® fibre optique (avec butée + support butée) MONT BLANC Control® head with fiber optic (with depth stop + depth stop holder)	
Ref. 10475	Cavalier de pulvérisation stérilisable Spraying nozzle	
Ref. 10476D	Pack de 10 cavaliers de pulvérisation à usage unique Pack of 10 single use spraying nozzles	
Ref. 10415	Support de butée complet + butée pour MONT BLANC Control® Depth stop holder + MONT BLANC Control® depth stop	
Ref. 10418	Butée pour support MONT BLANC Control® MONT BLANC Control® depth stop	
Ref. 6458	Réglet Ruler	
Ref. 10436	Bouchons de protection pour LED ou fibre optique Protective caps for fiber optic or for LED	
Ref. 2044	Clip pour ligne d'irrigation Clip for tubing	

ENTRETIEN DES INSTRUMENTS ROTATIFS

Ref. 1930X	Bombe lubrifiante 500 ml avec embout (Réf. 1932X) Lubricating spray 500 ml supplied with a tip (Ref. 1932X)	
Ref. 1930X D	Carton de 12 bombes lubrifiantes 500 ml avec embout (Réf. 1932X) Box of 12 lubricating sprays 500 ml supplied with a tip (Ref. 1932X)	
Ref. 1931X	Bombe lubrifiante 500 ml sans embout Lubricating spray 500 ml without tip	
Ref. 1931X D	Carton de 12 bombes lubrifiantes 500 ml sans embout Box of 12 lubricating sprays 500 ml without tip	
Ref. 1932X	Embout bombe lubrifiante pour standard ISO Tip for lubricating spray (ISO type attachment)	
Ref. 1933X	Embout bombe lubrifiante pour turbine (utilisable pour TORQ CONTROL ®) et module de calibrage 11400 et 11660 Tip for lubricating spray for high-speed HP (can be used with TORQ CONTROL ® and Calibration module ref. 11400 and 11660)	
Ref. 1923	Burette d'huile Oil can	





INFORMATIONS / GARANTIE

INFORMATIONS / GUARANTEE

VALIDITÉ DU DOCUMENT - VALIDITY OF THE DOCUMENT

La parution de ce catalogue annule et remplace toutes les versions antérieures.
The publication of this catalogue cancels and replaces all the former versions.

DOCUMENTATION - DOCUMENTATION

Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à votre conseiller commercial Anthogyr. Il vous fournira toute la documentation détaillée nécessaire.
For any further information, please refer to your Anthogyr representative. He will provide you all necessary documentation .

Le Distributeur dont l'exclusivité est applicable sur une zone de la Communauté Européenne s'engage conformément aux exigences de l'Union Européenne, à mettre en œuvre les dispositions nécessaires au suivi de la traçabilité des produits Anthogyr.

Pour les Distributeurs hors Europe, une démarche identique est fortement conseillée.

En aucun cas Anthogyr ne pourra être tenu pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation.

Anthogyr recommande aux utilisateurs de vérifier, avant de le mettre en œuvre, qu'il convient exactement à l'emploi envisagé.

The Distributor which exclusivity is for a zone part of the European Community, commits itself to conform to the European Union requirements and to implement all necessary means for the tracking of the Anthogyr Products. For the distributors outside of EU, such a tracking process is strongly recommended.

In any cases, Anthogyr will never be held responsible for any corporeal or material damage which should directly or indirectly be due to a wrong use of the Anthogyr product. Anthogyr recommends all users, before starting to use the products, to carefully check how this product match or not, with its intended use.

MONT BLANC®

Le sommet à portée de main
Reach for the top



- Revêtement **i.coat®** : excellent grip et résistance supérieure.
i.coat® coating,
Optimal handgrip and increased resistance.
- Ergonomie optimale.
Optimum ergonomics.
- Démontabilité en un seul geste.
Fast dismantling device.
- Tenue de couple exceptionnelle : 80 N.cm.
Exceptional torque : 80 N.cm.
- Sécurité optimale : contrôle de profondeur par butée*.
Optimum security : adjustment of the drilling depth thanks to a stop system.*
- Entretien irréprochable : cavalier de pulvérisation à usage unique !
Impeccable maintenance : single use spraying nozzle!

*Réf 10401X, 10401XL.

Gamme implantologie
Implantology range



Crédits photos : Anthogyr - Tous droits réservés - Photos non contractuelles. C15 - 2011-06

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Classe IIb. CE0459. LNE/G-MED. Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.

ANTHOGYR SAS
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tél. +33 (0)4 50 58 02 37
Fax +33 (0)4 50 93 78 60
www.anthogyr.com

ANTHOGYR BENELUX
Kortrijksesteenweg 62
9830 Sint-Martens-Latem
Phone: +32 9 321 73 08
Fax: +32 9 321 73 09
info.bnl@anthogyr.com

Anthogyr
PRIME MOVER IN IMPLANTOLOGY